


GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA PARA VOLUMEN DE VEJIGA (BVI 6100 & BVM 6500)


Nota: Para activar la unidad exploradora (el escáner) cuando esté en el modo latente, pulse y suelte cualquier botón y espere hasta escuchar el chirrido.

1 Escoja el género


Escoja la opción femenina SÓLO para pacientes que no hayan tenido una histerectomía.

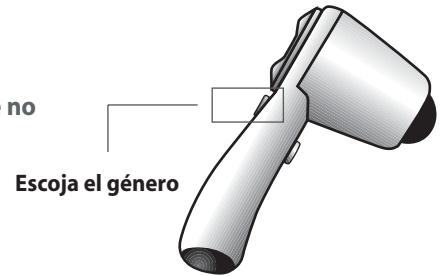


2 Aplique la almohadilla de gel Sontac®

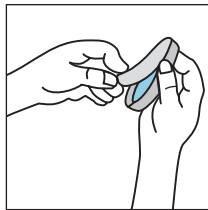

Abra el paquete de la almohadilla de gel

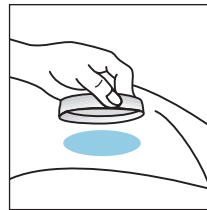


Coloque la almohadilla de gel sobre el abdomen del o la paciente, a 3 cm (1 pulgada) por encima del symphysis pubis

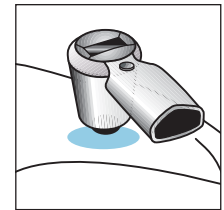

Ponga el cabezal explorador sobre la almohadilla de gel

3 Apunte hacia la vejiga


Dirija el cabezal explorador ligeramente hacia abajo, en dirección al cóccix del o la paciente

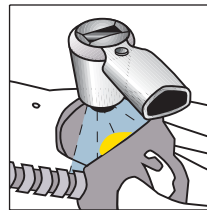

Apunte hacia la vejiga

4 Pulse el botón Exploración (Scan)

Botón Exploración (Scan)

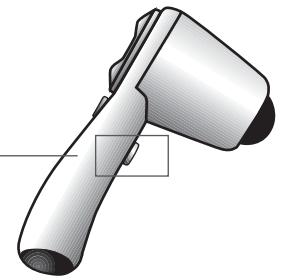


5 Verifique la dirección

5A Flechas parpadeantes = Vuelva a apuntar




Aparece una flecha parpadeante

Ejemplo:

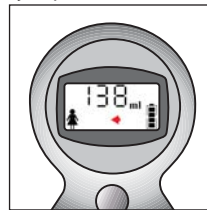

1) La flecha apunta hacia la izquierda

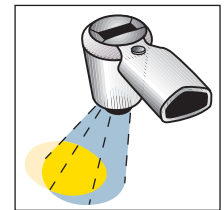


2) Apunte hacia la izquierda y vuelva a explorar

**5B Flechas sólidas o sin flechas = Acepte la exploración
No es necesario volver a apuntar el cabezal**



Flecha sólida o ninguna

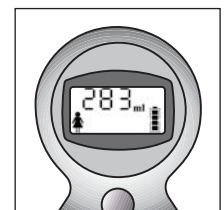

BVI 6100



BVM 6500


GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA PARA VOLUMEN DE VEJIGA (BVI 6100 & BVM 6500)

Nota: Para activar la unidad exploradora (el escáner) cuando esté en el modo latente, pulse y suelte cualquier botón y espere hasta escuchar el chirrido.

1 Pulse el botón **Género (Gender)**, situado bajo la pantalla LCD, para escoger o deseleccionar la opción femenina. Una vez activada dicha opción, aparecerá un **icono de Mujer (Female)** en la pantalla LCD. Use la opción femenina sólo cuando se explore a una mujer paciente que NO haya tenido una histerectomía. Para todos los demás pacientes, pulse el botón de género hasta que no aparezca ningún icono.

2 Palpe el symphysis pubis (hueso púbico) del o la paciente. Coloque una almohadilla de gel de ultrasonidos Sontac® en la línea media del abdomen del o la paciente, aproximadamente 3 cm (1 pulgada) por encima del symphysis pubis.

3 Ponga el cabezal de exploración (el extremo redondeado de la unidad exploradora) sobre la almohadilla de gel Sontac®, dirigida hacia el lugar en el que se espere que se encuentre la vejiga. Para la mayoría de los pacientes, esto quiere decir que dicho cabezal se deberá dirigir ligeramente hacia abajo del cóccix del paciente.

4 Pulse y suelte el botón **Exploración (Scan)**, situado en la parte inferior de la empuñadura de la unidad exploradora. Aparecerá un símbolo de exploración  en la esquina superior derecha de la pantalla LCD durante la operación.

Mantenga la unidad bien sujeta hasta que concluya la exploración. Cuando oiga un pitido, la exploración habrá concluido y aparecerá una medición del volumen de la vejiga en la pantalla LCD.

5 Compruebe que la unidad exploradora esté bien dirigida, utilizando las flechas de **Apunte (Aiming)** parpadeantes.

5A Si aparece en la pantalla LCD una flecha de apunte parpadeando, por debajo de la medición de volumen de la vejiga, deberá reajustar la dirección en el sentido indicado por la flecha parpadeante. Representese las ondas ultrasónicas proyectadas del cabezal explorador hacia el cuerpo del o la paciente. Si la flecha de apunte parpadeante señala a la izquierda, dirija la unidad exploradora de tal modo que las ondas ultrasónicas se proyecten más hacia la izquierda. Luego, vuelva a explorar al o la paciente. Repita esto tantas veces como sea necesario hasta que en la pantalla aparezca una flecha sólida o ninguna en absoluto.

5B La medición del volumen de la pantalla que se presenta será exacta cuando no aparezca ninguna flecha de apunte, o bien, cuando haya una flecha sólida después de la exploración. Anote el volumen de la vejiga del o la paciente. La unidad exploradora no conservará esa medición después de que se inicie otra exploración.



BVI 6100



BVM 6500