

# VINKKEJÄ JA TEKNIKOITA



## VAKAVA VAROITUS

Kun ohjaat endotrakeaaliputkea (ETT) videolaryngoskoopin distaalipäähän, varmista, että tarkastelet potilaan suuta, et videomonitorin näyttöä. Muussa tapauksessa risat tai pehmeä suulaki voivat vahingoittua.

## 4-VAIHEINEN TEKNIikka

1. **Tarkastele suuta:** Pitele videolaryngoskoopin terää vasemmassa kädessäsi ja vie se keskilinjassa nieluun.
2. **Tarkastele näyttöä:** Etsi kurkunkansi ja säädä sitten terää, jotta saat parhaan näkymän äänihuulista.
3. **Tarkastele suuta:** Vie putken distaalipää varovasti terän kärjen lähelle.
4. **Tarkastele näyttöä:** Intuboi loppuun: ohjaa putkea kiertämällä tai kallistamalla sitä tarpeen mukaan.

## VINKKEJÄ TERÄN SISÄÄNVIEMISEEN


- Vie terä kielen keskilinjassa kurkunkanteen.
- GlideScope-videolaryngoskooppeja käyttämällä tehtävät intubaatiot edellyttävät noin 0,5–1,5 kg:n (1,1–3,3 lbs) nostovoimaa.
- Endotrakeaaliputken intubointikaran käyttäminen on suositeltavaa. Jäykkä GlideRite®-intubointikara on suunniteltu mukailmaan aikuisille tarkoitettujen teräkokojen kulmaa. Kulmaltaan 60–90 asteen muovattavaa intubointikaraa voi käyttää.
- Voit avustaa ETT-putken kulkua vetämällä intubointikaraa noin 5 cm (2 in) samalla, kun viet ETT-putkea hitaasti eteenpäin. Terän vetäminen takaisin 1 cm:n (0,4 in) voi myös pienentää tarkastelukulmaa ja päästää glottiksen putoamaan.



## PIKA-ALOITUS

### VIDEOSAUVAN JA KIELEN KIINNITTÄMINEN

1. Valitse sopiva kieli (kertakäyttöinen terä) ja videosauva.
2. Vie videosauva kieleen ja paina sitten videosauvan kantaa, kunnes se lukittuu paikalleen.
3. Aseta monitorin oikealla puolella pidikkeen takana kaapelin nuoli kohdakkain liitäntän nuolen kanssa ja työnnä sitten kaapeliliitintä, kunnes kuulet napsahduksen.

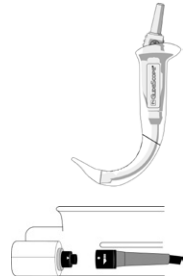

### JÄRJESTELMÄN VALMISTELEMINEN

4. Työnnä monitorin virtakytkin vasemmalle.
5. Varmista, että akussa on tarpeeksi varausta. Vihreän virran merkkivalon ei pitäisi vilkkua.
6. Varmista, että monitorissa näkyy videosauvasta tuleva kuva. Kielestä voi näkyä pieni osa päältä tai ylävasemmalta.



*Jotkin osat on desinfioitava ennen käyttöä. Katso tarkat tiedot käyttö- ja huolto-oppaasta.*