

DICAS E TÉCNICAS



AVISO

Quando você estiver guiando o tubo endotraqueal (ETT) até a ponta distal do videolaringoscopia, certifique-se de que está olhando para a boca do paciente e não para a tela do monitor de vídeo. Caso contrário, poderão ocorrer lesões nas amígdalas ou no palato mole.

TÉCNICA DE 4 PASSOS

1. **Observe na boca:** com a lâmina do videolaringoscopia na mão esquerda, insira-a na linha média da orofaringe.
2. **Observe na tela:** identifique a epiglote e manipule a lâmina de modo a obter melhor visualização glótica.
3. **Observe na boca:** guie cuidadosamente a ponta distal do tubo até a posição próxima da ponta da lâmina.
4. **Observe na tela:** conclua a intubação girando ou flexionando cuidadosamente o tubo conforme for necessário.

DICAS PARA INSERÇÃO DE LÂMINA

- Insira a lâmina na linha média da língua até o epiglote.
- Intubações usando o videolaringoscopia GlideScope exigem cerca de 0,5 a 1,5 kg (1,1 a 3,3 lbs) de força de içamento.
- É recomendado o uso de um estilete de tubo endotraqueal. O estilete rígido GlideRite® foi projetado para complementar o ângulo de lâminas de tamanho adulto. Um estilete maleável pode ser usado com ângulo de 60 a 90°.
- Para auxiliar a passagem do ETT, retire o estilete cerca de 5 cm (2 in) enquanto empurra levemente o ETT. Pode ser útil remover a lâmina em 1 cm (0,4 in) para reduzir o ângulo de visão e permitir que a glote caia.



INÍCIO RÁPIDO

CONECTE O BASTÃO DE VÍDEO E O PLÁSTICO DE PROTEÇÃO

1. Selecione um bastão de vídeo e plástico de proteção adequado (lâmina descartável).
2. Insira o bastão de vídeo no plástico de proteção e depois insira a base do bastão de vídeo até travá-la na posição.
3. No lado direito do monitor, atrás da base, alinhe a seta no cabo e a seta na porta e depois insira o conector no cabo até ouvir um clique.



PREPARAR O SISTEMA

4. No monitor, move a chave liga-desliga para o lado esquerdo.
5. Certifique-se de que a bateria esteja suficientemente carregada. A luz de alimentação verde não deve estar piscando.
6. Verifique se o monitor mostra uma imagem do bastão de vídeo. Uma pequena parte do plástico de proteção pode ficar visível no topo ou na parte superior esquerda.



Alguns componentes devem ser desinfetados antes do uso. Para obter instruções detalhadas, consulte o Manual de manutenção e operações.



Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011 U.S.A.
425.867.1348 Fax: 425.883.2896
verathon.com