

TIPS OCH TEKNIKER



VARNING

När du styr endotrakealtuben (ETT) till den distala spetsen på videolaryngoskopet ska du titta i patientens mun, inte på videomonitorn. I annat fall kan du skada tonsillerna eller den mjuka gommen.

4-STEGSTEKNIK

1. **Titta i munnen:** Med videolaryngoskopbladet i din vänstra hand för du in det vid mittlinjen i svalget.
2. **Titta på skärmen:** Identifiera epiglottis och styr sedan bladet för att se glottis så bra som möjligt.
3. **Titta i munnen:** Styr försiktigt in den distala spetsen av slangen i position nära bladspetsen.
4. **Titta på skärmen:** Slutför intuberingen genom att försiktigt rotera eller vinkla slangen för att rikta om den efter behov.

TIPS FÖR INFÖRNING AV BLAD

- För in bladet längs mittlinjen av tungan till epiglottis.
- Intuberingar med hjälp av GlideScope-videolaryngoskopet kräver cirka 0,5-1,5 kg (1,1-3,3 lbs) lyftkraft.
- Vi rekommenderar användning av en endotrakealtub med mandräng. GlideRite® styv mandräng är utformad så att den är kompatibel med vinkeln på blad i vuxenstorlekar. En formbar mandräng kan användas med en vinkel på 60–90°.
- För att underlätta endotrakealtubens passage drar du tillbaka mandrängen cirka 5 cm (2 in) samtidigt som du försiktigt för fram endotrakealtuben. Att dra tillbaka bladet 1 cm (0,4 in) kan även vara fördelaktigt för att minska betraktningvinkeln och låta glottis falla.



SNABBSTART

FÄST VIDEOBATONGEN OCH ENGÅNGSBLADEN

1. Välj lämpligt engångsblad och lämplig videobatong.
2. För in batongen i engångsbladet och tryck sedan på videobatongens bas tills den klickar på plats.
3. Rikta kabelns pil mot portens pil på monitorns högra sida, bakom vaggan, och för sedan in kabelkontakten tills du hör ett klick.

FÖRBERED SYSTEMET

4. För strömbrytaren på monitorn till vänster.
5. Se till att batteriet är tillräckligt laddat. Den gröna strömlampan ska inte blinka.
6. Se till att monitorn visar en bild från videobatongen. En liten del av engångsbladet kan vara synligt högst upp eller uppe till vänster.

Vissa komponenter måste desinficeras innan användning. För detaljerade anvisningar, se Drift- och underhållshandboken.

