



BladderScan i10™

Manual de Funcionamiento y Mantenimiento

BladderScan
verathon

BladderScan i10™

Manual de funcionamiento y mantenimiento

En vigor desde: 6 de septiembre de 2023

Precaución: Las leyes federales de Estados Unidos limitan la venta de este sistema a médicos o por prescripción facultativa.

Información de contacto

Para obtener más información relativa a su sistema BladderScan, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon o visite verathon.com/service-and-support.



Verathon Inc.

20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011 EE. UU.
Tel.: +1 800 331 2313 (solo EE. UU. y Canadá)
Tel.: +1 425 867 1348
Fax: +1 425 883 2896
verathon.com



Verathon Medical (Europa) B.V.

Willem Fenengastraat 13
1096 BL Amsterdam
Países Bajos
Tel: +31 (0) 20 210 30 91
Fax: +31 (0) 20 210 30 92

Verathon Medical (Australia) Pty Limited

Unit 9, 39 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
Australia
Dentro de Australia: tel. 1800 613 603/fax 1800 657 970
Internacional: tel. +61 2 9431 2000/
fax +61 2 9475 1201



MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau
Suiza



CH

Anandic Medical Systems AG

Stadtweg 24
8245 Feuerthalen
Suiza



CE 0123

Copyright © 2023 Verathon, Inc. Todos los derechos reservados.

BladderScan, BladderScan i10, BladderScan Prime, BladderScan Prime Plus, BladderTraq, CaliScan, ImageSense, V_{MODE}, Verathon y los símbolos asociados son marcas comerciales de Verathon Inc. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

No todos los productos de Verathon Inc. mostrados están disponibles para la venta comercial en todos los países.

La información de este manual puede cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Para disponer de la información más actualizada, consulte los documentos disponibles en verathon.com/service-and-support.

Índice

| | |
|--|----------|
| INFORMACIÓN IMPORTANTE | 1 |
| DESCRIPCIÓN GENERAL | 1 |
| Descripción del producto | 1 |
| Declaración de uso previsto | 1 |
| Aviso a todos los usuarios | 1 |
| Uso básico..... | 1 |
| Entorno de uso previsto..... | 2 |
| Privacidad HIPAA..... | 2 |
| INFORMACIÓN DE SEGURIDAD | 2 |
| Seguridad de energía ultrasónica..... | 2 |
| Contraindicaciones | 2 |
| Advertencias y precauciones..... | 3 |
| INTRODUCCIÓN | 9 |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA..... | 9 |
| Componentes y accesorios | 10 |
| CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA..... | 12 |
| Características de la consola..... | 12 |
| Características de la sonda | 14 |
| Características de la batería..... | 15 |
| ICONOS DEL SISTEMA..... | 15 |
| Iconos de la pantalla táctil de la consola | 15 |
| Iconos de información de la consola | 18 |
| Colores del LED indicador de batería | 19 |
| Iconos de nivel de batería de la consola | 21 |

| | |
|---|-----------|
| PUESTA EN MARCHA..... | 22 |
| MONTAJE DEL SISTEMA..... | 22 |
| <i>Procedimiento 1. Inspección inicial.....</i> | 22 |
| <i>Procedimiento 2. Montaje de la estación de trabajo y conexión del sistema</i> | 23 |
| <i>Procedimiento 3. Inserción de una batería.....</i> | 25 |
| <i>Procedimiento 4. Carga de la batería</i> | 27 |
| <i>Procedimiento 5. Instalación de la impresora (opcional).....</i> | 29 |
| CONFIGURACIÓN DE LOS AJUSTES..... | 30 |
| <i>Procedimiento 1. Configuración de los ajustes generales.....</i> | 30 |
| <i>Procedimiento 2. Configuración de los ajustes administrativos.....</i> | 32 |
| <i>Procedimiento 3. Configuración de los ajustes de examen.....</i> | 34 |
| <i>Procedimiento 4. Configuración de los ajustes para informes impresos y en PDF.....</i> | 35 |
| <i>Procedimiento 5. Personalización de los cálculos de ahorro de costes.....</i> | 36 |
| <i>Procedimiento 6. Configuración de un PIN para exámenes guardados.....</i> | 37 |
| <i>Procedimiento 7. Configurar un PIN para configuración del sistema</i> | 38 |
| USO DEL SISTEMA | 40 |
| MEDICIÓN DEL VOLUMEN VESICAL..... | 40 |
| <i>Procedimiento 1. Preparación para el examen</i> | 40 |
| <i>Procedimiento 2. Introducción de información sobre el paciente o el ID. del operador (opcional)</i> | 41 |
| <i>Procedimiento 3. Use un lector de código de barras para introducir un ID de paciente o de operador (opcional).....</i> | 42 |
| <i>Procedimiento 4. Medición del volumen vesical.....</i> | 43 |
| <i>Procedimiento 5. Revisión de los resultados de examen</i> | 46 |
| <i>Procedimiento 6. Generación de un código de barras que contenga el resultado de un examen</i> | 49 |
| <i>Procedimiento 7. Imprimir, guardar o salir de un examen activo</i> | 50 |
| <i>Procedimiento 8. Visualización de ahorro de costes.....</i> | 51 |
| GESTIÓN DE EXPLORACIONES GUARDADAS..... | 52 |
| <i>Procedimiento 1. Recuperación de un examen guardado.....</i> | 52 |
| <i>Procedimiento 2. Eliminación de un examen guardado.....</i> | 53 |
| <i>Procedimiento 3. Exportación de exploraciones guardadas.....</i> | 54 |

| | |
|--|-----------|
| REPROCESAMIENTO | 56 |
| LIMPIADORES Y DESINFECTANTES | 56 |
| Eficacia de la desinfección | 56 |
| Compatibilidad | 57 |
| PRÁCTICAS RECOMENDADAS E INSTRUCCIONES | 58 |
| <i>Procedimiento 1. Limpieza y desinfección de la consola, la sonda y el cable</i> | 58 |
| <i>Procedimiento 2. Limpieza de la impresora (opcional)</i> | 59 |
| MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD | 60 |
| INSPECCIONES PERIÓDICAS | 60 |
| INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD DEL SISTEMA..... | 61 |
| CALIBRACIÓN | 61 |
| SOFTWARE DEL SISTEMA | 62 |
| ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO..... | 62 |
| GARANTÍA | 62 |
| PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO | 63 |
| <i>Procedimiento 1. Carga de papel térmico en la impresora (opcional)</i> | 63 |
| <i>Procedimiento 2. Realización de un autodiagnóstico</i> | 64 |
| <i>Procedimiento 3. Actualización del software</i> | 65 |
| <i>Procedimiento 4. Ejecución de una prueba CaliScan</i> | 66 |
| <i>Procedimiento 5. Apagado del sistema</i> | 67 |
| <i>Procedimiento 6. Apagado incondicional</i> | 68 |
| <i>Procedimiento 7. Copiar la configuración del sistema en otros sistemas</i> | 69 |
| <i>Procedimiento 8. Apagado y encendido de los puertos USB</i> | 71 |

| | |
|--|-----------|
| AYUDA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS | 72 |
| RECURSOS DE AYUDA..... | 72 |
| <i>Procedimiento 1. Consulte del tutorial integrado.....</i> | <i>72</i> |
| <i>Procedimiento 2. Consulta del vídeo de formación integrado.....</i> | <i>73</i> |
| Recursos de servicio al cliente | 73 |
| REPARACIONES | 74 |
| PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS | 74 |
| <i>Procedimiento 1. Resolución de problemas de la batería de la consola.....</i> | <i>74</i> |
| <i>Procedimiento 2. Resolución de problemas de conexión de la sonda.....</i> | <i>75</i> |
| <i>Procedimiento 3. Resolución de problemas de enfoque de la sonda.....</i> | <i>75</i> |
| <i>Procedimiento 4. Restaurar valores de fábrica</i> | <i>77</i> |
| <i>Procedimiento 5. Resolución de problemas de impresiones irregulares (opcional).....</i> | <i>78</i> |
| <i>Procedimiento 6. Desatasco de papel (opcional).....</i> | <i>80</i> |
| <i>Procedimiento 7. Sustitución del rodillo de accionamiento de la impresora (opcional).....</i> | <i>81</i> |
| <i>Procedimiento 8. Evaluación de los mensajes de error de la consola</i> | <i>83</i> |
| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO | 85 |
| ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA..... | 85 |
| ESPECIFICACIONES DE LOS COMPONENTES..... | 88 |
| COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA..... | 93 |
| CUMPLIMIENTO DE LOS ACCESORIOS CON LAS NORMAS..... | 96 |
| GLOSARIO | 97 |

Información importante

Descripción general

Descripción del producto

El sistema BladderScan i10 permite realizar mediciones no invasivas del volumen de la vejiga urinaria. El sistema calcula el volumen vesical con ImageSense®, un algoritmo de inteligencia artificial patentado de Verathon que recurre a datos del mundo real para crear una evaluación coherente de la ubicación, el tamaño y la forma de la vejiga.

Los componentes principales del sistema son una consola y una sonda. La pantalla táctil de la consola muestra información importante, como el volumen de la vejiga, el enfoque direccional con información en tiempo real, la configuración y los ajustes administrativos y los indicadores de nivel de la batería y estado de carga. La pantalla táctil también proporciona la mayoría de los controles del sistema, tanto durante los exámenes como entre ellos. Un médico con el permiso de acceso adecuado puede usar la pantalla táctil para recuperar exámenes almacenados en cualquier momento.

La consola incluye una plataforma para una batería de ion de litio recargable. Cuando la consola está conectada a la alimentación externa, se carga la batería.

Declaración de uso previsto

El sistema BladderScan i10 es un dispositivo de ecografía cuyo uso previsto es la medición del volumen urinario en la vejiga de forma no invasiva.

Aviso a todos los usuarios

El sistema BladderScan i10 solo debe utilizarlo el personal que haya recibido formación y autorización por parte de un médico o la institución que proporciona la atención al paciente. Los usuarios deben leer todo el manual antes de usar el sistema. No intente poner en marcha el sistema si no comprende bien todas las instrucciones y los procedimientos descritos en el presente manual.

Uso básico

El *uso básico* es el uso del sistema necesario para evitar riesgos inaceptables. El uso básico del sistema BladderScan i10 es el de emitir ultrasonidos, mostrar ecografías y proporcionar valores numéricos relativos al volumen de la vejiga. El sistema no debe producir una temperatura excesiva o indeseada en la superficie de la sonda.

Entorno de uso previsto

El sistema BladderScan i10 está diseñado para ser utilizado en entornos de atención médica profesional, como hospitales, clínicas y consultorios médicos.

Privacidad HIPAA

Las regulaciones de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud de 1996 ("HIPAA") requieren que nuestros clientes monitoreen y limiten las formas en que se accede, utiliza, almacena, transmite y elimina la información confidencial de los pacientes. Nuestros clientes son los últimos responsables de garantizar que toda la información médica electrónica contenida en el sistema esté protegida. En el curso de la prestación de servicios a los clientes, Verathon eliminará toda información médica protegida del sistema si dicha información está presente.

Información de seguridad

Seguridad de energía ultrasónica

Hasta la fecha, la exposición a los ultrasonidos de diagnóstico por impulsos no ha demostrado producir efectos adversos. Sin embargo, los ultrasonidos deben usarse de forma prudente y la exposición total del paciente debe mantenerse *en el nivel más bajo posible* (ALARA, del inglés "as low as reasonable achievable"). Siguiendo el principio ALARA, los ultrasonidos solo los deben usar profesionales médicos cuando esté indicado clínicamente, usando los tiempos de exposición más bajos posibles que sean necesarios para obtener información útil a nivel clínico. Para obtener más información sobre ALARA, consulte la publicación del Instituto Americano de Ecografía en la Medicina, *Medical Ultrasound Safety*.

El usuario no puede ajustar la potencia de salida de ultrasonidos del sistema BladderScan i10, que está limitada al nivel mínimo preciso para un rendimiento eficaz. Para obtener más información sobre los niveles acústicos de salida, consulte el capítulo "[Especificaciones del producto](#)" en la página 85.

Contraindicaciones

El sistema BladderScan i10 no está indicado para uso fetal o para uso en pacientes fetales, pacientes embarazadas, pacientes con heridas o piel abierta en la región suprapúbica, ni pacientes con ascitis.

Advertencias y precauciones

Advertencia indica que el uso o el uso indebido del sistema pueden provocar lesiones, reacciones adversas graves o la muerte. *Precaución* indica que el uso o el uso indebido del sistema pueden provocar un problema como un mal funcionamiento, fallos o daños en el producto. Preste atención a las secciones del manual marcadas como *Importante*, ya que contienen recordatorios o resúmenes de las precauciones siguientes que conciernen a un componente o una situación de uso específicos. Cuando utilice el sistema, tenga en cuenta las siguientes advertencias y precauciones.

ADVERTENCIAS



ADVERTENCIA

No utilice el sistema en los siguientes casos:

- Pacientes fetales.
- Pacientes embarazadas.
- Pacientes con la piel o heridas abiertas en la región suprapúbica.
- Pacientes con ascitis.



ADVERTENCIA

Tenga en cuenta las siguientes condiciones que pueden afectar a la transmisión de ultrasonidos:

- Sondaje: una sonda insertada en la vejiga de un paciente puede afectar a la precisión de las mediciones de la vejiga de dos maneras: 1) por introducir aire en la vejiga, que puede bloquear la señal ultrasónica, y 2) por tener un globo de retención de sondas, que puede interferir en la medición del volumen. Sin embargo, la medición del volumen aún puede resultar útil desde el punto de vista clínico siempre que sea grande (por ejemplo, para la detección de una sonda bloqueada).
- Cirugía abdominal: el tejido cicatricial, las incisiones quirúrgicas, las suturas y las grapas pueden influir en la transmisión de las ecografías. Tenga especial cuidado en las exploraciones de pacientes sometidos a cirugía abdominal.



ADVERTENCIA

Si no logra obtener una imagen repetible óptima, la precisión del resultado puede verse comprometida.



ADVERTENCIA

Las características anatómicas que rodean a la vejiga pueden interferir con la exploración precisa. Cuando enfoque con la sonda, asegúrese de que la vejiga completa esté en el campo de visión y centrada.



ADVERTENCIA

No use agua ni lubricantes quirúrgicos como sustituto del gel de ecografía. La sustitución de estos u otros materiales puede dar lugar a resultados de exploración incorrectos.



ADVERTENCIA

Este producto solo se puede limpiar y desinfectar usando los procesos aprobados indicados en este manual. Verathon recomienda los métodos de limpieza y desinfección indicados basándose en la compatibilidad con los materiales del producto.



ADVERTENCIA

La limpieza resulta fundamental para garantizar que el componente está preparado para la desinfección. Si no se limpia el dispositivo adecuadamente, puede seguir habiendo contaminación una vez finalizado el procedimiento de desinfección.



ADVERTENCIA

Al manipular o eliminar los productos de limpieza y desinfección que aparecen en este manual, asegúrese de seguir las instrucciones de manipulación y eliminación suministradas por los fabricantes de dichos productos.



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de explosión, no use el sistema en presencia de sustancias anestésicas que puedan prenderse si se exponen a un incendio o una chispa eléctrica existentes.



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o quemaduras, no utilice el sistema junto con equipos quirúrgicos de alta frecuencia.



ADVERTENCIA

No use accesorios, transductores o cables distintos de los especificados o suministrados por Verathon. El uso de dichos dispositivos puede hacer que este sistema emita energía electromagnética excesiva o que capte señales electromagnéticas no deseadas o ruido de sus alrededores. Estos fallos de funcionamiento pueden causar una operación incorrecta, retrasos en los procedimientos o ambos.



ADVERTENCIA

El equipo portátil de comunicaciones de radiofrecuencia (incluidos los periféricos, como los cables de antena y las antenas externas) no se puede usar a menos de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del sistema BladderScan, incluidos los cables que Verathon especifica o proporciona para uso con el sistema. Si no se mantiene esta distancia, el rendimiento del sistema puede degradarse y la visualización de la imagen puede verse comprometida.



ADVERTENCIA

Debe evitarse el uso de este equipo próximo a otros equipos o colocado sobre ellos porque podría provocar un funcionamiento incorrecto. Si es necesario realizar este uso, este equipo y los demás equipos deben observarse para comprobar que funcionen con normalidad.



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de fugas, explosión, incendios o lesiones graves, tenga en cuenta lo siguiente a la hora de manejar la batería de ion de litio incluida en el sistema:

- Extraiga la batería de la consola si no se ha utilizado durante un período de tiempo prolongado.
- No use el cargador de baterías opcional para cargar la batería a una distancia de hasta 1,83 m (6 pies) del paciente, incluidos los muebles que contienen el paciente (como la cama o la camilla del examen).
- No cargue la batería en un área en la que se administre oxígeno.
- Nunca provoque un cortocircuito en la batería al juntar terminales de la batería con cualquier otro objeto conductor.
- Nunca exponga la batería a impactos, vibraciones o una presión anómalos.
- Use un limpiador de uso genérico, como todos los limpiadores en aerosol multiusos o un paño humedecido con jabón y agua para limpiar la batería. No limpie ni desinfecte la batería utilizando los materiales de limpieza o desinfección descritos en el capítulo Reprocesamiento de este manual.
- No desmonte la batería, no deje que sobrepase los 60 °C (140 °F) ni que se queme.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños y consérvela en su embalaje original hasta que esté listo para usarla.
- Deseche sin demora las baterías usadas de acuerdo con los reglamentos locales en materia de residuos o reciclaje.
- Si observa fugas en la batería o la carcasa está agrietada, póngase unos guantes de protección para manipularla y deséchela de inmediato.
- Coloque cinta aislante, como cinta de celofán, en los electrodos durante el transporte.



ADVERTENCIA

Para mantener la seguridad eléctrica, use solamente la batería, el adaptador de alimentación y el cable de alimentación que se entregan con el sistema. Use solamente accesorios y periféricos recomendados por Verathon, incluido el cargador de baterías accesorio.



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no intente abrir los componentes del sistema. Esto puede causar lesiones graves al operador o daños en el sistema que anulan la garantía. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon o con el representante local para cualquier reparación necesaria.



ADVERTENCIA

Para mantener la seguridad eléctrica, inspeccione el adaptador de alimentación para detectar posibles daños antes de su uso. No utilice un adaptador de alimentación que contenga grietas, aislamiento de cables rotos u otros daños. Si el adaptador de alimentación está dañado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon o con el representante local.



ADVERTENCIA

Para mantener la seguridad eléctrica, si está usando el cargador de baterías accesorio, inspecciónelo para comprobar que no presente daños antes de cada uso. No utilice un cargador de baterías con grietas u otros daños. Si el cargador de baterías está dañado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon o con el representante local.



ADVERTENCIA

Si la batería se sobrecalienta o consume corriente en exceso, apague el sistema y desconecte la alimentación externa de inmediato. Si permite que el sobrecalentamiento o el consumo excesivo de corriente continúen, puede iniciarse un incendio o se puede causar una lesión eléctrica. Para obtener ayuda con los fallos de funcionamiento de la batería, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon.



ADVERTENCIA

Excepto los ajustes que se pueden configurar a través de los menús del software del sistema, no se permite ninguna modificación mecánica, eléctrica o acústica de este equipo.



ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de lesiones, cuando la puerta de la impresora esté abierta:

- No toque el mecanismo de la impresora ni el cabezal de impresión, ya que pueden estar calientes después de la reciente impresión.
- No toque el borde del cortador de papel.



ADVERTENCIA

Nunca utilice el sistema BladderScan i10 para mostrar la imagen de características anatómicas que no sean de la vejiga.



ADVERTENCIA

Este sistema solo está previsto como herramienta de medición. No es un dispositivo de diagnóstico.



ADVERTENCIA

Utilice únicamente una unidad flash USB de tipo pasivo. No utilice unidades USB alimentadas por otra fuente externa.

PRECAUCIONES



PRECAUCIÓN

Declaración de prescripción: Las leyes federales de Estados Unidos limitan la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.



PRECAUCIÓN

Antes de explorar a un paciente, asegúrese de que la batería está instalada y correctamente cargada. El sistema no puede realizar la exploración mientras está conectado a la alimentación externa.



PRECAUCIÓN

Para evitar dañar los cables y los accesorios, no doble ni tuerza los cables asociados al sistema.



PRECAUCIÓN

Para eliminar el sistema o los accesorios al final de su vida útil, consulte la sección "Eliminación del dispositivo". El sistema y los dispositivos relacionados pueden contener aceites minerales, baterías y otros materiales peligrosos para el medio ambiente.



PRECAUCIÓN

Antes de realizar una actualización del sistema, un autodiagnóstico o un procedimiento de mantenimiento, asegúrese de que la batería está instalada y cargada en un nivel de al menos el 20 %. Desconecte la alimentación externa antes de realizar una actualización del sistema.



PRECAUCIÓN

Los equipos electromédicos requieren la adopción de precauciones especiales en lo relativo a la compatibilidad electromagnética (CEM), y deben instalarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones recogidas en este manual. Para obtener más información, consulte la sección "Compatibilidad electromagnética".

Este dispositivo puede emitir radiofrecuencias y es muy improbable que ocasione interferencias nocivas en otros dispositivos próximos. No se garantiza la ausencia de interferencias en determinadas instalaciones. Una prueba de estas interferencias puede ser la reducción del rendimiento de este dispositivo o de otros cuando funcionen simultáneamente. Para corregir las interferencias, use las medidas siguientes:

- Encienda y apague los dispositivos próximos para determinar el origen de la interferencia.
- Cambie la orientación o la ubicación de este y de los otros dispositivos.
- Aumente la distancia de separación entre ellos.
- Conecte este dispositivo a una toma de corriente de un circuito distinto del de los otros dispositivos.
- Elimine o reduzca las EMI mediante soluciones técnicas como el aislamiento.
- Adquiera aparatos médicos que cumplan con la CEI 60601-1-2 sobre compatibilidad electromagnética.
- Tenga en cuenta que los equipos de comunicación por radiofrecuencia móviles o portátiles (como teléfonos móviles) pueden afectar a los equipos electromédicos. Recuerde adoptar las precauciones oportunas cuando utilice este instrumento.



PRECAUCIÓN

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños en el dispositivo que quedan excluidos de la garantía:

- No sumerja los componentes del sistema en solución desinfectante o de limpieza o en otros líquidos.
- No someta ningún componente del sistema a métodos de esterilización o autoclave por vapor, óxido de etileno, radiación o similares.
- No utilice cepillos metálicos o abrasivos. Estos accesorios pueden rayar un componente del sistema y provocar daños permanentes.

Introducción

Descripción general del sistema

BladderScan i10 es un sistema de ecografía 3D que mide el volumen vesical de forma no invasiva. Los principales componentes del sistema son la consola con pantalla táctil y una sonda que contiene el transductor ecográfico. El sistema también incluye una batería recargable. Los accesorios y las opciones de configuración disponibles para el sistema incluyen una estación de trabajo móvil, una impresora, un cargador de baterías externo y baterías recargables extras. Para obtener más información, consulte la sección “Componentes y accesorios” en la página 10.

Figura 1. Sistema BladderScan i10 (que muestra la impresora y la estación de trabajo adicionales)



El sistema incluye un tutorial integrado y pantallas de ayuda. La consola cuenta con diversos ajustes que pueden personalizarse y una función Exámenes guardados que le permite recuperar, imprimir o transferir los exámenes guardados.

La consola también incluye un modo de obtención de imágenes en tiempo real previo a la exploración opcional que le permite localizar la vejiga visualizando una vista en modo B del abdomen en tiempo real, antes de completar la exploración de medición del volumen.

Componentes y accesorios

Tabla 1. Componentes y accesorios incluidos en el sistema

COMPONENTES Y ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA



Consola




Sonda



Batería



Unidad flash USB de uso

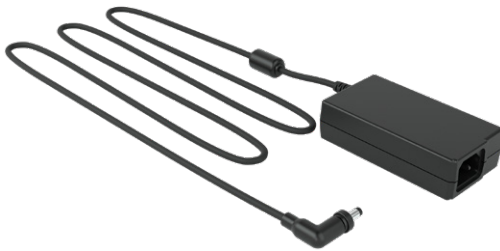

Adaptador de alimentación



Cable de alimentación
Nota: El enchufe puede ser distinto en función de la región



Paquetes de gel de ecografía

Tabla 2. Componentes y accesorios del sistema opcionales

COMPONENTES Y ACCESORIOS DEL SISTEMA OPCIONALES



Estación de trabajo móvil




Cargador de baterías



Batería extra



Impresora

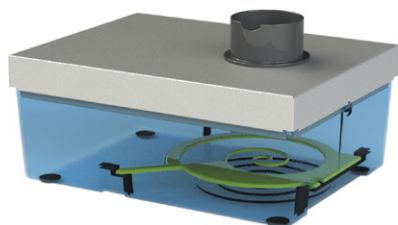

Kit de calibración



Lector de código de barras



Papel térmico

Además, en su región podrá pedir gel de ecografía y materiales de referencia rápida. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon, con el representante local o visite verathon.com/service-and-support.

Características del sistema

Características de la consola



Lea la sección “[Advertencias y precauciones](#)” antes de usar el sistema.

El principal componente de la consola es una pantalla táctil que le permite realizar exploraciones, gestionar los resultados y personalizar los ajustes. A un lado de la consola se introduce una batería recargable, y la superficie inferior incluye varios puertos para conectar componentes y accesorios del sistema, tales como dispositivos externos extraíbles para el almacenamiento de datos. También puede personalizar la consola agregando una impresora opcional.

Figura 2. Características de la consola

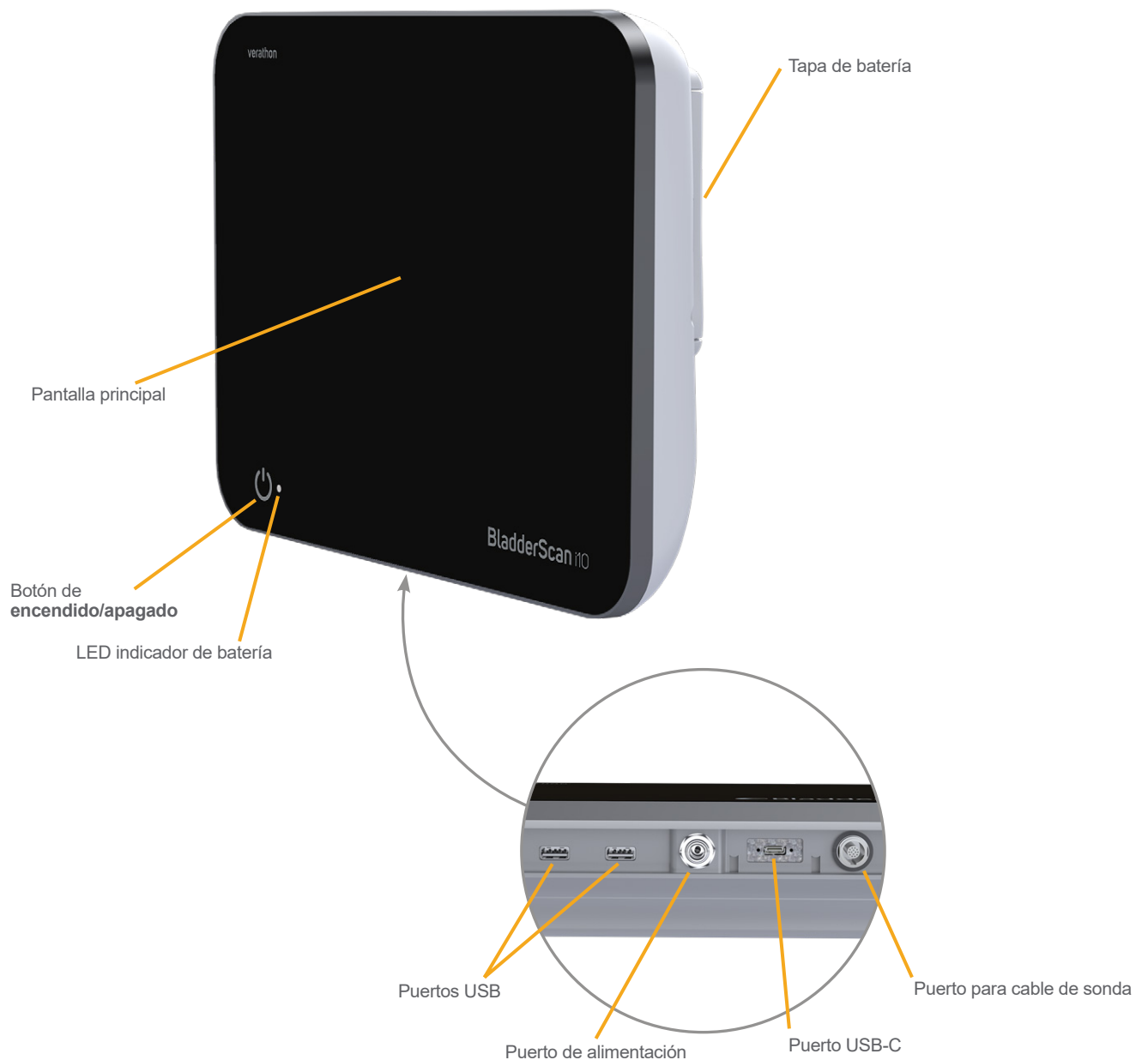


Tabla 3. Descripciones de las características de la consola

| NOMBRE DEL COMPONENTE | OBJETIVO |
|-----------------------------------|--|
| Pantalla principal | Cuenta con controles de pantalla táctil para la interfaz de usuario del sistema. |
| Tapá de batería | Se abre para cambiar la batería recargable. |
| Botón de encendido/apagado | Enciende o apaga el sistema. Cuando el sistema está encendido o está cargando una batería, se ilumina un LED situado al lado del botón de encendido/apagado . |
| Puerto para cable de sonda | Conecta la sonda a la consola. |
| Puertos USB | Permite conectar la impresora opcional y los medios de almacenamiento externos extraíbles. |
| Puerto USB-C | Permite conectar dispositivos externos extraíbles para el almacenamiento de datos. |
| Puerto de alimentación | Conecta el adaptador de alimentación a la consola. |

IMPORTANTE

Si pulsa el botón de **encendido/apagado** y lo mantiene pulsado durante más de dos segundos, la consola inicia un proceso de apagado incondicional. En ciertas circunstancias, este proceso puede provocar la pérdida de información no guardada.

Características de la sonda

La sonda se conecta al paciente y transmite y recibe ondas ecográficas al desplazar de manera automática el transductor interno para explorar doce planos, lo que genera una imagen tridimensional de la vejiga. La sonda está unida a la consola mediante un cable.

Figura 3. Características de la sonda

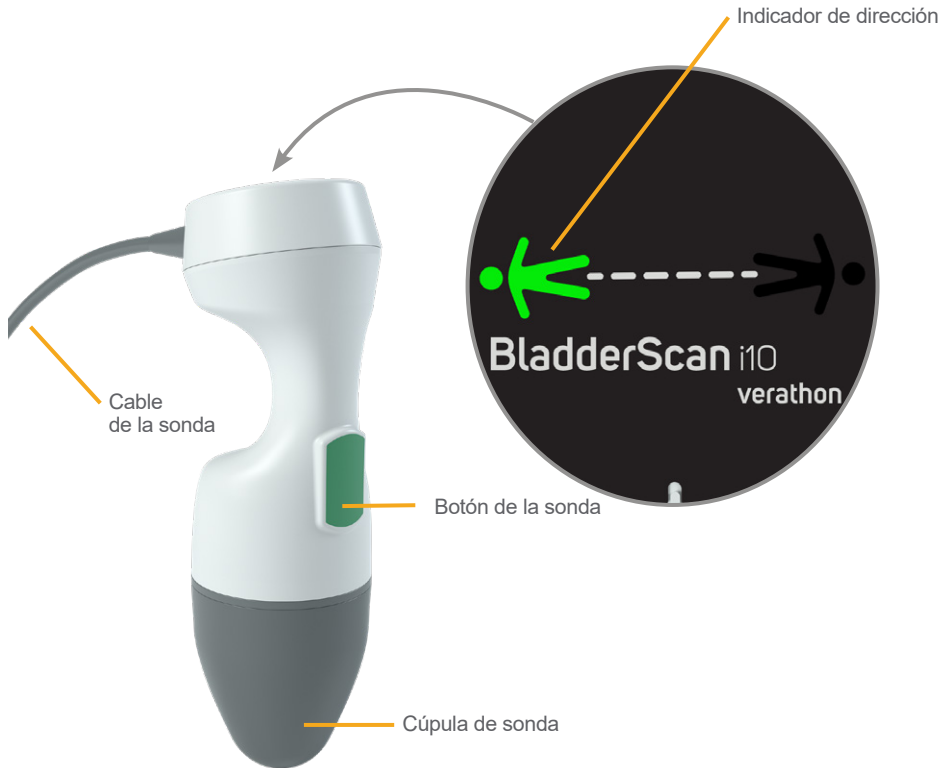


Tabla 4. Características de la sonda

| NOMBRE DEL COMPONENTE | OBJETIVO |
|------------------------|---|
| Botón de la sonda | Inicia el enfoque o la exploración cuando se pulsa. |
| Indicador de dirección | Muestra la orientación de la sonda seleccionada para la exploración en curso. El indicador de figura humana iluminado debe estar orientado en la misma dirección que el paciente. |
| Cable de la sonda | Conecta la sonda a la consola. |
| Cúpula de sonda | Se coloca el contacto con el abdomen del paciente y transmite ultrasonidos. |

Características de la batería

El sistema recibe alimentación de una batería de ion de litio. Se pueden ordenar baterías adicionales o de repuesto, si es necesario.

La consola BladderScan i10 funciona como el cargador de baterías principal. Para cargar una batería, la consola debe conectarse a una toma de corriente de pared usando el adaptador de alimentación y el cable de alimentación incluidos. Use solamente la consola o el cargador de baterías Verathon opcional para cargar la batería; si utiliza cualquier otro cargador de baterías, puede dañarla. Con el fin de prevenir conexiones incorrectas, la forma de la batería solo permite introducirla en la consola en la orientación correcta.

La consola detecta automáticamente si está o no conectada a la alimentación externa. Mientras la consola está conectada, las funciones de exploración de la sonda están desactivadas.

Cada batería cuenta con un botón de prueba que le permite ver el nivel de carga de la batería sin tener que introducirla en la consola. Si pulsa el botón **Test (Probar)** en la parte trasera de la batería, la pantalla situada al lado del botón de prueba se iluminará para mostrar el nivel de carga aproximado: 25 %, 50 %, 75 % o 100 %.

Figura 4. Batería de ion de litio BladderScan i10





Iconos del sistema

Iconos de la pantalla táctil de la consola

La pantalla táctil de la consola muestra la interfaz que controla el sistema. Los iconos de la Tabla 5 pueden aparecer en la pantalla y puede tocarlos para realizar la función asociada al icono.

Tabla 5. Iconos de la pantalla táctil

| ICONO | FUNCIÓN |
|-------|---|
| | Exámenes guardados: en la pantalla Inicio; permite ver todos los exámenes que se han guardado en la consola. |
| | Configuración: en la pantalla Inicio; permite abrir la pantalla Configuración. |
| | Tutorial: en la pantalla Inicio; permite ver el tutorial integrado. |
| | Vídeo de formación: en la pantalla Inicio; permite ver el vídeo de formación integrado. |




| ICONO | FUNCIÓN |
|---|--|
|  | Posición: en la página Inicio; permite seleccionar de qué lado del paciente está ubicado durante el examen. |
|  | Explorar: comienza a explorar al paciente. |
|  | Modo B: permite ver la imagen ecográfica a modo de pares de planos ortogonales y bidimensionales desde la exploración tridimensional. Los contornos de los rasgos detectados aparecen superpuestos en la imagen. <i>Nota: Puede desactivar la visualización de los contornos detectados. Para obtener más información, consulte la sección “Configuración de los ajustes de examen” en la página 34.</i> |
|  | Modo C: permite visualizar la imagen ecográfica a modo de vista transversal de la exploración tridimensional. La imagen del Modo C está formada por una región circular con una superposición reticulada. La imagen muestra la forma de la vejiga y, si lo detecta, la sombra del hueso púbico. |
|  | Código Aztec: muestra un resumen de los resultados de la exploración como código Aztec (con el cuadrado de posicionamiento en el centro). |
|  | Código 128: muestra un resumen de los resultados de la exploración como código de barras en el formato Código 128. |
|  | Matriz de datos: muestra un resumen de los resultados de la exploración como matriz de datos. |
|  | Código QR: muestra un resumen de los resultados de la exploración como código QR (con los cuadrados de posicionamiento en las esquinas). |
|  | Eliminar: en la pantalla Resultados; permite borrar la exploración en pantalla y su volumen. (El sistema conserva todas las otras exploraciones y toda la información del paciente). En las pantallas Exámenes guardados; permite eliminar un examen guardado (ya sea el que se muestra actualmente en pantalla o un examen seleccionado en una lista). |
|  | Ayuda: inicia el tutorial integrado o muestra el texto de ayuda de la pantalla táctil. |
|  | Imprimir: imprime la exploración, el autodiagnóstico y los resultados de cálculo de ahorro. <i>Nota: Esta función solo está disponible si ha conectado la impresora opcional.</i> |
|  | Guardar y salir: en la pantalla Resultados; permite guardar el resultado de la exploración con el volumen mayor y volver a la pantalla de Inicio. |
|  | Exportar exámenes: en la pantalla Exámenes guardados; permite mover los exámenes de la memoria interna del sistema a una unidad USB externa. Esta opción solo está disponible si se ha conectado una unidad externa. |
|  | Configurar ahorro: permite personalizar los valores para calcular el ahorro de costes que puede conseguirse con la exploración en lugar de implantar un catéter en el paciente. |

| ICONO | FUNCIÓN |
|---|--|
|  | CaliScan™: En la pantalla de autodiagnóstico, realice una prueba funcional del mecanismo de la sonda del sistema y del transductor ecográfico. |
|  | Atrás: vuelve a la pantalla anterior o a la pantalla Inicio. |
|  | Salir: en la pantalla Resultados; permite salir del examen sin guardar y volver a la pantalla de Inicio. |
|  | Anterior: permite regresar al plano o ángulo de exploración anterior mientras se visualizan las imágenes en el modo B en la pantalla Resultados. |
|  | Siguiente: permite avanzar al plano o ángulo de exploración siguiente mientras se visualizan las imágenes en el modo B en la pantalla Resultados. |
|  | Brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla táctil. El icono muestra el ajuste actual. |
|  | Volumen: permite ajustar el volumen de los sonidos que se reproducen a través del altavoz de la consola. El icono muestra el ajuste actual. |
|  | Aumentar: permite subir el brillo o el volumen. |
|  | Disminuir: permite bajar el brillo o el volumen. |
|  | Silenciar: permite encender o apagar el altavoz. |
|  | Reproducir: permite iniciar o reanudar la reproducción mientras se visualiza el tutorial integrado o el vídeo de formación. |
|  | Pausa: permite pausar la reproducción mientras se visualiza el tutorial integrado o el vídeo de formación. |
|  | Anterior: permite regresar al fotograma anterior mientras se visualiza el tutorial integrado. |
|  | Siguiente: permite avanzar al fotograma siguiente mientras se visualiza el tutorial integrado. |
|  | Saltar adelante: permite avanzar 5 segundos la reproducción mientras se visualiza el vídeo de formación integrado. |
|  | Saltar atrás: permite retroceder 5 segundos la reproducción mientras se visualiza el vídeo de formación integrado. |
|  | En la pantalla Resultados; permite ampliar la lista del historial de exploraciones realizadas durante el examen en curso. |
|  | En la pantalla Resultados; permite cerrar la lista del historial de exploraciones realizadas durante el examen en curso. |
|  | Permite cerrar la ventana Código de barras o un cuadro de diálogo de advertencia. |

Iconos de información de la consola

Los iconos de la Tabla 6 proporcionan información sobre el estado del sistema, pero tocarlos no afecta al sistema.

Tabla 6. Iconos de información


| ICONO | FUNCIÓN |
|---|--|
|  | La impresora se está cargando, pero no le queda suficiente carga en la batería interna incorporada para funcionar correctamente. |
|  | La impresora no puede funcionar debido a un problema con su batería interna incorporada. |
|  | Preste atención a la alerta complementaria. |

Colores del LED indicador de batería



ADVERTENCIA

Si la batería se sobrecalienta o consume corriente en exceso, apague el sistema y desconecte la alimentación externa de inmediato. Si permite que el sobrecalentamiento o el consumo excesivo de corriente continúen, puede iniciarse un incendio o se puede causar una lesión eléctrica. Para obtener ayuda con los fallos de funcionamiento de la batería, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon.






El LED indicador de batería ubicado junto al botón de **encendido/apagado**  muestra el estado actual de la batería de la consola. Excepto en los casos en los que la batería se sobrecalienta o consume corriente en exceso, el LED muestra el nivel de carga actual de la batería.



El sistema carga la batería siempre que esté conectada a la alimentación externa. Si el sistema está encendido al mismo tiempo, la batería no puede completar toda la carga, por lo tanto el sistema se carga de forma continua. Si el sistema está conectado a la alimentación externa, pero está apagado, detiene la carga una vez que la batería está completamente cargada.

En la Tabla 7 se muestra de qué manera el LED indicador de batería informa de la condición de la batería basándose en si el sistema está conectado a la alimentación externa y si está encendido o apagado.

Nota: Los indicadores de estado que no indican un nivel de carga se aplican a cualquier nivel de carga. Si el sistema está apagado y no está conectado a la alimentación externa, el LED siempre está apagado.

Tabla 7. Colores del LED indicador de batería

| COLOR | CONECTADO A LA ALIMENTACIÓN EXTERNA | | NO CONECTADO A LA ALIMENTACIÓN EXTERNA |
|---|--|---|--|
| | Sistema encendido | Sistema apagado | Sistema encendido |
| Parpadeo en rojo  | — | — | El sistema puede apagarse pronto debido a una temperatura excesiva de la batería |
| Rojo fijo  | Menos del 2 %, o no hay batería | — | Superior o igual al 5 %, menos del 10 %* |
| Parpadeo en azul  | Temperatura excesiva de la batería o corriente excesiva durante la carga | Temperatura excesiva de la batería, corriente excesiva durante la carga, o no hay batería | — |
| Azul fijo  | — | Superior o igual al 2 %, menos del 99 % | — |
| Amarillo fijo  | Superior o igual al 2 %, menos del 20 % | — | Superior o igual al 10 %, menos del 20 % |

| COLOR | CONECTADO A LA ALIMENTACIÓN EXTERNA | | NO CONECTADO A LA ALIMENTACIÓN EXTERNA |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Sistema encendido | Sistema apagado | Sistema encendido |
| Verde fijo  | Superior o igual al 20 % | — | Superior o igual al 20 % |
| Apagado  | — | Superior o igual al 99 % [†] | — |










* Nota: Si el sistema está encendido pero no está conectado a la alimentación externa y el nivel de la batería es inferior al 5 %, el sistema intenta apagarse automáticamente. Durante el apagado automático, el LED indicador de batería permanece de color rojo.

† Nota: Si inserta una batería que está completamente agotada y luego conecta la alimentación externa a la consola, el LED indicador de batería permanece apagado. En esos casos, la batería no está lo suficientemente cargada para que la consola la detecte. Pulse el botón de **encendido/apagado** para comenzar a cargar la batería.

Iconos de nivel de batería de la consola

El icono de nivel de batería aparece en la barra de estado en la parte superior de la pantalla táctil. El icono y el valor de porcentaje situados al lado del icono indican la potencia restante de la batería. Para obtener información sobre cómo cargar la batería, consulte el procedimiento “Carga de la batería” en la página 27.

Tabla 8. Icono de nivel de batería

| ICONO | FUNCIÓN |
|---|--|
|  | La batería está cargada por completo o casi por completo. |
|  | La batería está cargada al 80 % aprox. |
|  | La batería está cargada al 60 % aprox. |
|  | La batería está cargada al 40 % aprox. |
|  | La batería está cargada al 20 % aprox. Sustitúyala por una batería nueva o conecte la alimentación externa. |
|  | La batería está cargada al 10 % aprox. Sustitúyala por una batería nueva o conecte la alimentación externa. |
|  | La batería tiene menos del 5 % de carga. Sustituya la batería o conecte la alimentación externa de inmediato. En este punto, el sistema se apaga si la alimentación externa no está conectada. Si la alimentación externa está conectada, es posible que el software del sistema no pueda detectar temporalmente la batería mientras se inicia la carga. |
|  | La batería no está presente o no puede detectarse porque su nivel de carga es demasiado bajo (menos del 2 %). Si la alimentación externa está conectada, el LED situado junto al botón de encendido/apagado (⏻) es de color rojo, en lugar de amarillo o verde. Si apaga el sistema en estas condiciones, el LED parpadea en azul y el sistema sigue cargando la batería. |
|  | Se está cargando la batería. |

Puesta en marcha

Para ayudarle a empezar, estos temas explican cómo montar el sistema:

1. [Inspección inicial](#)
2. [Montaje de la estación de trabajo y conexión del sistema](#)
3. [Inserción de una batería](#)
4. [Carga de la batería](#)
5. [Instalación de la impresora \(opcional\)](#)

Después de montar el sistema, puede configurar los ajustes de usuario y añadir información personalizada:

6. [Configuración de los ajustes generales](#)
7. [Configuración de los ajustes administrativos](#)
8. [Configuración de los ajustes de examen](#)
9. [Configuración de los ajustes para informes impresos y en PDF](#)
10. [Personalización de los cálculos de ahorro de costes](#)
11. [Configuración de un PIN para exámenes guardados](#)
12. [Configurar un PIN para configuración del sistema](#)

Montaje del sistema

Procedimiento 1. Inspección inicial

Cuando reciba el sistema, Verathon recomienda que un operador que se encuentre familiarizado con el sistema realice una inspección visual completa y compruebe que no se han producido daños físicos durante el transporte. Si el sistema incluye algún componente opcional, asegúrese de incluirlos en esta inspección.

1. Abra con cuidado la parte superior de la caja de transporte. No introduzca objetos punzantes en la caja.
2. Saque el contenido y compruebe que ha recibido los componentes que corresponden a su sistema.
3. Compruebe que no se han producido daños en los componentes.
4. Si falta alguno de los componentes o está dañado, comuníquese al transportista y al servicio de atención al cliente de Verathon o al representante local.

Procedimiento 2. Montaje de la estación de trabajo y conexión del sistema

Consulte la *Hoja de inicio rápido de montaje de la estación de trabajo BladderScan i10* (número de referencia 0900-5007) para obtener instrucciones sobre cómo realizar estas tareas:


- Montar la estación de trabajo
- Instalar el adaptador de alimentación en la estación de trabajo
- Instalar la impresora (si adquirió la impresora junto con el sistema)

Para obtener instrucciones sobre cómo instalar un lector de código de barras opcional, consulte la *Barcode Scanner Kit Quick Start Sheet* (Hoja de inicio rápido del kit de lector de código de barras) (referencia 0900-5161).

El procedimiento describe cómo montar la consola en una estación de trabajo montada.


1. Coloque la consola delante de la montura de la consola en la estación de trabajo.
2. Inserte los cuatro tornillos de montaje de la consola (pieza F en el kit de herramientas que se envía junto con la estación de trabajo) a través de los orificios situados en las esquinas de la montura de la consola y dentro de los orificios correspondientes de la estación de trabajo. Apriete bien los cuatro tornillos con los dedos.

Nota: La montura de la consola en la estación de trabajo usa una combinación de tensión y fricción del muelle para mantener la posición de la consola. Se puede ajustar sin herramientas en cualquier momento.

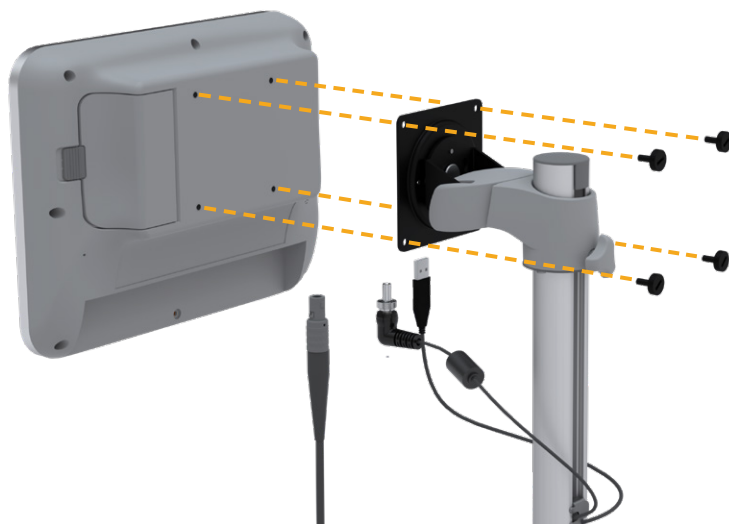

3. Conecte el cable de la sonda, el cable eléctrico, el cable de la impresora USB opcional y el cable del lector de códigos de barras opcional a la consola, tal como se muestra en la figura siguiente. Asegúrese de que el conector del cable eléctrico está colocado de forma segura y apriete manualmente su collarín de bloqueo con firmeza.

Nota: No use herramientas para conectar o extraer los conectores.

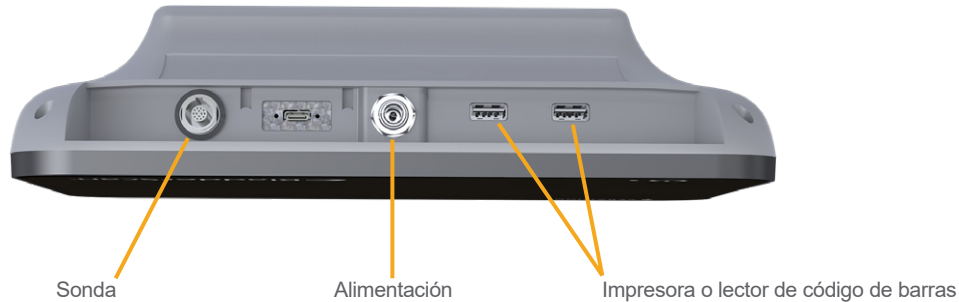

Sugerencia: Puede conectar la impresora a cualquiera de los dos puertos USB que se indican en la imagen. Sin embargo, si la conecta al puerto USB que está más cerca del puerto de alimentación, le resultará más fácil conectar las unidades USB o el lector de código de barras más tarde. No intente conectar la impresora al puerto USB-C entre el puerto de la sonda y el puerto de alimentación.

Procedimiento 3. Inserción de una batería

1. Deslice el enganche para quitarlo de la puerta del compartimento de la batería en la consola y, a continuación, abra la puerta.



2. Abra la puerta del compartimento de la batería.



3. Si ya hay una batería en la consola, tire de la correa para retirarla.



4. Deslice una batería cargada para introducirla en el compartimento de la batería con el logotipo de Verathon orientado hacia la parte posterior de la consola y presione ligeramente hasta que la batería quede completamente asentada.

Nota: Las baterías están diseñadas para evitar una colocación incorrecta. Si resulta difícil introducir la batería en su sitio, sáquela, dele la vuelta y vuelva a intentarlo. No fuerce la batería para encajarla en su sitio.



5. Cierre y trabe la puerta del compartimento de la batería.

Procedimiento 4. Carga de la batería




Lea la sección “[Advertencias y precauciones](#)” antes de realizar la siguiente tarea.

Con el sistema se incluye una batería de ion de litio. Antes de usar el sistema por primera vez, debe cargar por completo la batería.

Opción 1. Carga de la batería en la consola

IMPORTANTE

La sonda no funciona si el sistema está conectado a la alimentación externa (red eléctrica). Para explorar a los pacientes, la consola debe contar con una batería cargada y el sistema debe estar desenchufado de la alimentación externa.

1. Antes de cada uso, inspeccione la batería, el adaptador de alimentación y el cable de alimentación para detectar posibles daños. Si un componente está dañado, no lo utilice. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon o con el representante local.
2. Asegúrese de que el cable eléctrico está conectado de forma segura a la consola.
3. Enchufe el adaptador de alimentación a una toma de corriente de pared ordinaria. Asegúrese de que el cable de alimentación puede desconectarse fácilmente, en caso necesario.
4. Si el LED indicador de batería de la consola permanece apagado, pulse el botón de **encendido/apagado** . El LED debe iluminarse para indicar que la batería se está cargando.
5. Deje que la batería se cargue por completo. La primera carga debería suponer unas 4 horas.

Opción 2. Carga con el cargador externo (opcional)

1. Antes de cada uso, inspeccione el cargador de baterías, la o las baterías, el adaptador de alimentación y el cable de alimentación para detectar posibles daños. Si un componente está dañado, no lo utilice. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon o con el representante local.
2. Conecte el adaptador de alimentación al cable de alimentación.



3. Conecte el adaptador de alimentación al cargador de baterías.



4. Enchufe el adaptador de alimentación a una toma de corriente de pared ordinaria. Asegúrese de que el cable de alimentación puede desconectarse fácilmente, en caso necesario.
5. Inserte una o dos baterías en las ranuras del cargador de baterías. Si está cargando dos baterías por primera vez, cargue ambas baterías al mismo tiempo para obtener mejores resultados.

Nota: Para asegurarse de que cada batería está correctamente conectada al cargador, asegúrese de que el logotipo de Verathon y sus contactos están orientados hacia la derecha vistos desde el frente del cargador.



6. Deje que la batería se cargue por completo. Las luces indicadoras en el cargador de baterías indican el estado de cada batería:
 - Verde fijo: batería cargada por completo
 - Parpadeo en verde: la batería se está cargando
 - Amarillo fijo: la carga de la batería se ha suspendido o está en modo de espera
 - Rojo: error de carga. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon o con el representante local.
 - Apagadas: no se ha detectado ninguna batería

Procedimiento 5. Instalación de la impresora (opcional)

Hay una impresora opcional disponible para los sistemas BladderScan i10. La impresora está montada en la base de la estación de trabajo y se comunica con la consola a través de una conexión USB estándar.

Si su empresa ha adquirido la impresora como parte del pedido del sistema BladderScan i10 inicial, siga las instrucciones de la *Hoja de inicio rápido de montaje de la estación de trabajo BladderScan i10* (número de referencia 0900-5007) para instalar la impresora mientras monta la estación de trabajo.

Si su empresa adquiere una impresora para un sistema BladderScan i10 existente, siga las instrucciones de la *Hoja de inicio rápido de instalación de la impresora BladderScan i10* (número de referencia 0900-5068) para añadir la impresora a la estación de trabajo e instalar el cable USB entre la consola y la impresora.


Configuración de los ajustes

El sistema viene configurado con ajustes predeterminados que son adecuados para numerosos usuarios. En esta sección se incluyen instrucciones para modificar los ajustes predeterminados y adaptarlos a las necesidades de su centro.


Procedimiento 1. Configuración de los ajustes generales

Este procedimiento le ayuda a configurar sus preferencias regionales y las preferencias de su centro, como la placa de identificación del sistema, el idioma en que opera el sistema y las preferencias de formato para la fecha, hora, moneda y números.

1. Si es necesario, pulse el botón de **encendido/apagado** (⏻). Al cabo de unos segundos, la consola muestra la pantalla de Inicio.
2. En la pantalla de Inicio, seleccione **Configuración**. Se abre la pantalla de configuración con la pestaña General.

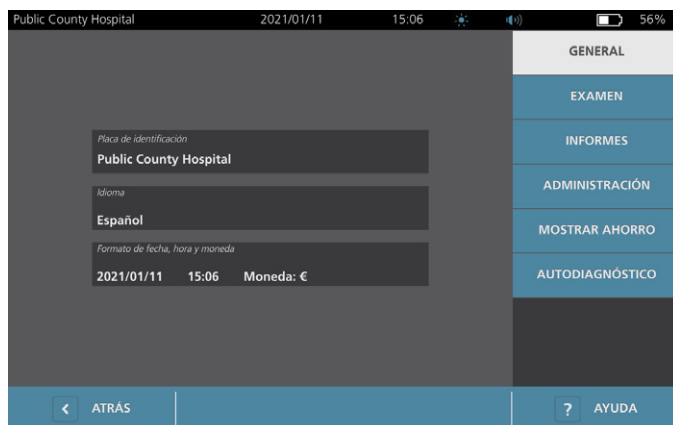

3. En la pestaña General, toque **Placa de identificación**.
4. Si aparece un teclado, introduzca el PIN para configuración y, a continuación, pulse **Aceptar**.
5. Use el teclado virtual para escribir un nombre o número identificador y, a continuación, toque **Aceptar**. El texto que ha introducido aparece en la barra de estado en la parte superior de cada pantalla.

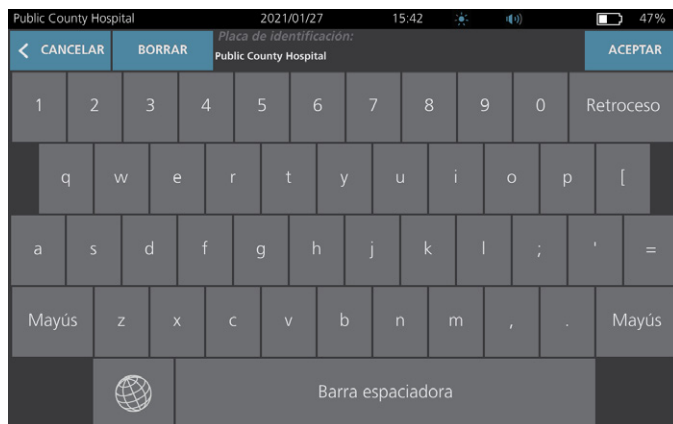

6. Si desea cambiar el idioma en que opera el sistema y en que se guardan los exámenes, toque **Idioma**.
7. Si aparece un teclado, introduzca el PIN para configuración y, a continuación, pulse **Aceptar**.
8. En la pantalla Idioma, seleccione una opción disponible. El idioma se actualiza inmediatamente.
9. Toque **Atrás** para volver a la pantalla Configuración y, a continuación, toque **Formato de fecha, hora y moneda**.
10. Si aparece un teclado, introduzca el PIN para configuración y, a continuación, pulse **Aceptar**.
11. En la pantalla Fecha, hora y moneda, en el campo **Hora**, seleccione la hora o los minutos. Desplácese verticalmente para encontrar un valor y pulse sobre él para seleccionarlo.



12. En el campo **Hora**, seleccione un formato de hora. El formato de hora cambia entre AM, PM y 24 horas. Si selecciona un nuevo formato de hora, las horas y los minutos se actualizan si es necesario.
13. En el campo **Fecha**, seleccione el mes, día o año, pase el dedo verticalmente para ver un valor y, después, toque el valor para seleccionarlo. Repita la operación según sea necesario para definir el mes, día y año deseados.
14. En el campo **Formato de fecha**, toque la flecha y, después, seleccione el orden de visualización para el mes, día y año. El campo **Fecha** se actualiza inmediatamente para mostrar el formato seleccionado.
15. En el campo **Moneda de ahorro**, seleccione la flecha y, después, la moneda deseada. Esta unidad se utiliza para mostrar el ahorro que se consigue usando el sistema BladderScan en lugar del sondaje.
16. En el campo **Formato numérico**, toque la flecha y seleccione el formato de visualización para los campos numéricos.
17. Cuando haya acabado de configurar los ajustes Fecha, Hora y Moneda, toque **Atrás** dos veces. Esta acción guarda los ajustes y devuelve a la consola a la pantalla de Inicio.

Procedimiento 2. Configuración de los ajustes administrativos

1. En la pantalla de Inicio, toque **Configuración** y, a continuación, **Administración**.
2. Si aparece un teclado, introduzca el PIN para configuración y, a continuación, pulse **Aceptar**.



3. En la pestaña Administración, en el campo **Desconexión automática**, toque la flecha y, a continuación, seleccione la cantidad de minutos que el sistema debe permanecer encendido pero inactivo antes de que se apague.

Nota: Si el examen está en curso cuando comienza la desconexión automática, el sistema guarda los resultados del examen.

4. Si desea definir el tipo de código de barras que el sistema debe usar para mostrar los resultados del examen, toque **Formato de código de barras**.
5. En la lista Simbología del formato, seleccione uno de los tipos de código de barras siguientes.

| TIPO DE SÍMBOLO | EJEMPLO |
|------------------------|---------|
| Código 128 | |
| Matriz de datos | |
| Código QR | |
| Código Aztec | |

6. En la lista Valor codificado, seleccione la cantidad de información que desea incluir en el código de barras de cada examen. Si la selección lo permite, un símbolo > precede al volumen medido si la vejiga se extiende por fuera del área de exploración o si el hueso púbico obstruye una parte de la vejiga.

| SELECCIÓN | INFORMACIÓN INCLUIDA | EJEMPLO |
|--|---|---|
| Notas completas del examen | Una frase breve que contiene el volumen medido (incluido el símbolo >, si es necesario), la fecha, la hora y la identidad del sistema que creó la exploración | Se registró el 22/04/2020 a las 2:33 p. m. un volumen de vejiga urinaria de 200 ml. |
| Interferencia entre volumen y borde | El valor medido en ml (incluido el símbolo >, si es necesario) | 200 ml |
| Solo número de volumen | Un número que representa el volumen medido en ml. Esta selección solo admite dígitos numéricos, por lo tanto el símbolo > no está incluido. | 200 |

Nota: La opción Notas completas del examen no está disponible si se selecciona el formato Código 128.

7. En los cuadros Prefijo y Sufijo, seleccione los caracteres de control que el sistema debe agregar antes y después de la información:
- Barra invertida
 - Retorno de carro
 - Nueva línea
 - Retorno de carro y nueva línea
 - Tabulador
 - Ninguna

Si es necesario, póngase en contacto con el administrador del sistema HCD o HCE de su centro para verificar qué caracteres de control necesita el sistema.

8. Cuando haya acabado de configurar los ajustes, toque **Atrás** dos veces. Esta acción guarda los ajustes y devuelve a la consola a la pantalla de Inicio.


Procedimiento 3. Configuración de los ajustes de examen

Puede configurar estos ajustes de examen:

- Visualización de imágenes en el modo B
- Enfoque del modo B en directo
- Intervalo de tiempo límite para la función enfoque del modo B en directo
- Contorno de vejiga en imágenes del modo B
- Visualización de resultados del examen en formato de código de barras
- Asignación de un número de ID de paciente generado automáticamente al principio de cada examen

1. En la pantalla Inicio, seleccione **Configuración** y, después, **Examen**.
2. Si aparece un teclado, introduzca el PIN para configuración y, a continuación, pulse **Aceptar**.
3. En la pestaña Examen, toque el campo para actualizarlo y, si procede, seleccione o escriba el valor nuevo:

- **Activar enfoque de modo B en directo:** activa una vista previa ecográfica de la vejiga en tiempo real en el modo B antes de la exploración para ofrecer asistencia de enfoque.
- **Tiempo de inactividad:** define el periodo de tiempo durante el que está activo el enfoque del modo B en directo. Una vez que ha transcurrido el periodo de tiempo límite, el sistema vuelve a la pantalla de inicio. Este ajuste solo está visible si está activado el enfoque del modo B en directo.
- **Activar imágenes de plano de modo B:** permite visualizar imágenes del modo B en exámenes activos y guardados.
- **Habilitar código de barras en pantalla:** muestra los resultados del examen de un paciente como código de barras, además de los números legibles que el sistema muestra habitualmente.
- **Habilitar contorno de BladderTraq™:** en las imágenes del modo B muestra un contorno de color verde alrededor de los bordes detectados de la vejiga.
- **Asignar ID de paciente automáticamente:** genera automáticamente un nuevo ID de paciente para cada exploración. Puede sustituir este ID al principio de una exploración, como se describe en la sección “Introducción de información sobre el paciente o el ID. del operador (opcional)” en la página 41.

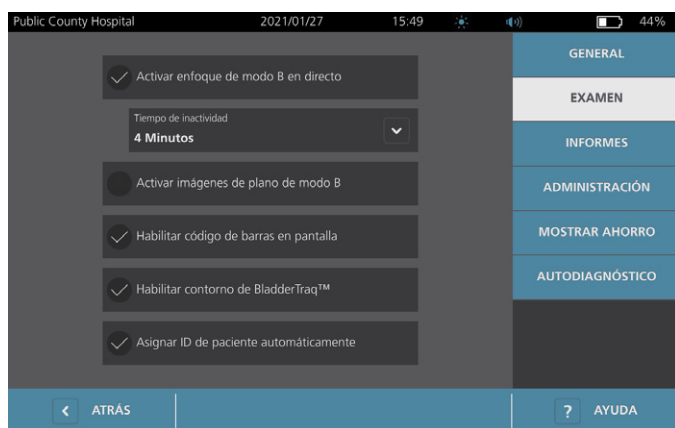

4. Cuando haya acabado, toque **Atrás**. Esta acción guarda los ajustes y devuelve la consola a la pantalla de Inicio.

Procedimiento 4. Configuración de los ajustes para informes impresos y en PDF


Si se conecta una impresora a la consola del sistema, podrá imprimir los resultados de la exploración. Los informes se imprimen verticalmente, a modo de recibo. Los informes de exploración están formados por varias secciones. Algunas de las secciones son opcionales.

También puede exportar los exámenes guardados en una unidad USB externa. Para información sobre cómo exportar exámenes, consulte “Exportación de exploraciones guardadas” en la página 54.

Puede personalizar qué secciones e imágenes del modo B se incluyen en los informes, con independencia de si se han impreso o exportado en formato PDF.

1. En la pantalla Inicio, seleccione **Configuración** y, después, **Informes**.
2. Si aparece un teclado, introduzca el PIN para configuración y, a continuación, pulse **Aceptar**.

Se abre la pantalla Configuración con la pestaña Informes.

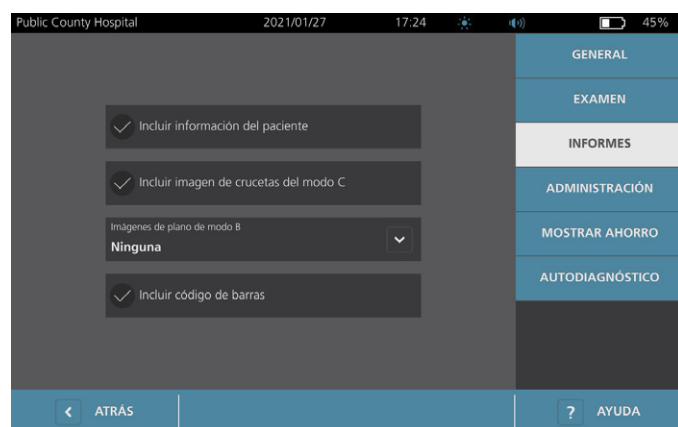

3. Toque la información para incluirla en los informes. Si aparece una marca de verificación a la izquierda de la descripción de la información, se imprime la información siguiente:
 - **Incluir información del paciente:** seleccione esta opción para incluir los datos del paciente, como el ID de paciente o la fecha de nacimiento.
 - **Incluir imagen de crucetas del modo C:** seleccione esta opción para incluir una imagen de la vista coronal calculada por el sistema. El círculo de enfoque y las crucetas se imprimen como líneas de color negro.
 - **Imágenes de plano de modo B:** seleccione uno de los grupos de imágenes siguientes para que aparezcan en los informes impresos y exportados:
 - **Ninguna:** no se incluyen planos de imagen en el modo B.
 - **Todas:** se imprimen los 12 planos de imagen en el modo B.
 - **Sagital y transversal:** se incluyen los dos planos principales de imagen en el modo B.
 - **Incluir contorno BladderTraq™:** seleccione esta opción para añadir los contornos de los contornos internos de la vejiga a la imagen del modo B.
 - **Incluir código de barras:** seleccione esta opción para incluir la medición del volumen final del examen como código de barras.
4. Cuando haya acabado de configurar los ajustes para la impresión de informes, seleccione **Atrás**. Esta acción guarda los ajustes y devuelve a la consola a la pantalla de Inicio.

Procedimiento 5. Personalización de los cálculos de ahorro de costes

El sistema proporciona valores predeterminados para calcular el ahorro de costes que puede conseguirse con la exploración en lugar de implantar un catéter en el paciente. Los ajustes predeterminados pueden personalizarse para reflejar las tarifas y los costes de su centro. Para cambiar la moneda usada para los cálculos de ahorros de costes, consulte “Configuración de los ajustes generales” en la página 30.

El ahorro total de costes que puede conseguirse si se utiliza el sistema basándose en esta fórmula:
 $Ahorro\ total\ de\ costes = (Sondajes\ evitados \times Costes\ de\ sondaje) + (ITU\ evitadas \times\ costes\ de\ ITU)$

1. En la pantalla Inicio, seleccione **Configuración** y, después, toque **Mostrar ahorro**.
2. En la pestaña Visualización del ahorro, toque **Configurar ahorro**.



3. En la pantalla Configuración del ahorro, toque un campo para actualizarlo e introduzca los nuevos valores. Los campos numéricos aceptan entradas decimales pero redondeadas al número entero más próximo.
 - **Tasa de ITU:** seleccione la tasa de infecciones del tracto urinario (ITU) derivada de los sondajes.
 - **Coste de ITU:** seleccione el coste por ITU en su centro.
 - **Coste de Sondaje:** seleccione el coste por procedimiento de sondaje.
 - **Volumen de Sondaje:** seleccione el umbral de volumen para el sondaje. Las exploraciones situadas por debajo del umbral de volumen no se usarán para los cálculos de ahorro de costes.

Nota: El botón Reiniciar Cálculos restablece los cálculos de ahorro a la fecha en que se ha presionado este botón. No es necesario tocar este botón para actualizar los valores de ahorro.



4. Cuando haya acabado, pulse dos veces **Atrás**. Esta acción guarda los ajustes y devuelve a la consola a la pantalla de Inicio.

Procedimiento 6. Configuración de un PIN para exámenes guardados

Si es necesario para restringir el acceso a la información guardada de exploraciones y pacientes, puede crear un PIN para proteger dichos datos. Después de crear el PIN, el sistema no muestra las exploraciones guardadas hasta que no se introduzca el PIN. Si se elimina el PIN, se desactiva este requisito.

Si necesita cambiar el PIN, tiene que introducir el PIN existente antes de crear uno nuevo.


Nota: Para obtener recomendaciones sobre cómo utilizar los PIN para conseguir la mejor seguridad posible, consulte “Información sobre seguridad del sistema” en la página 61.

1. En la pantalla de Inicio, seleccione **Configuración**.
2. En la pantalla Configuración, toque la pestaña **Administración**.
3. Si aparece un teclado, introduzca el PIN para configuración y, a continuación, pulse **Aceptar**.



4. En la pestaña Administración, toque **Gestionar la seguridad**.
5. En el cuadro de diálogo Gestionar la seguridad, toque **Cambiar PIN para exámenes guardados**.
6. Toque la casilla **Introducir nuevo PIN de exámenes guardados**. Mediante el teclado, introduzca el nuevo PIN de 4 dígitos necesario para acceder a los exámenes guardados en el sistema y, a continuación, toque **Aceptar**.

Como alternativa, para desactivar el PIN de los exámenes guardados, toque **Borrar** para quitar los dígitos que ya se han introducido. Toque **Aceptar** para guardar el cambio.

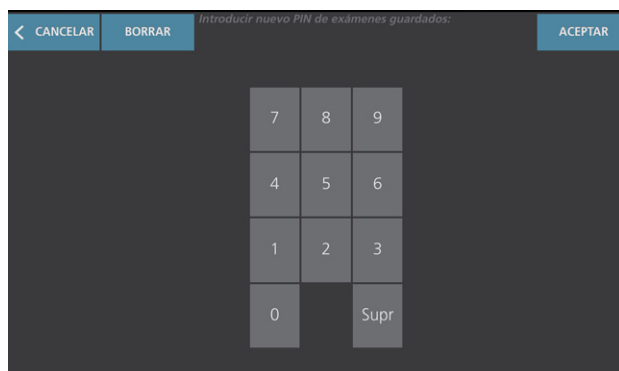

7. Toque la casilla **Confirmar nuevo PIN de exámenes guardados** y, a continuación, introduzca el mismo código que ha introducido anteriormente.
8. Toque **Guardar PIN para exámenes guardados**.

Procedimiento 7. Configurar un PIN para configuración del sistema

Si es necesario para garantizar que los ajustes de configuración del sistema de su organización sean coherentes, puede crear un PIN a fin de restringir los cambios de configuración en las pestañas Administración, Examen e Informes o bien restablecer el sistema con los valores predeterminados de fábrica. Si se elimina el PIN para configuración, estos elementos estarán disponibles para cualquier persona.

Si necesita cambiar el PIN para configuración, tiene que introducir el PIN existente antes de crear uno nuevo. Si ha olvidado el PIN existente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon para que le ayuden a borrarlo.


Nota: Para obtener recomendaciones sobre cómo utilizar los PIN para conseguir la mejor seguridad posible, consulte “Información sobre seguridad del sistema” en la página 61.

1. En la pantalla de Inicio, seleccione **Configuración**.
2. En la pantalla Configuración, toque la pestaña **Administración**.
3. Si aparece un teclado, introduzca el PIN para configuración y, a continuación, pulse **Aceptar**.



4. En la pestaña Administración, toque **Gestionar la seguridad**.
5. En el cuadro de diálogo Gestionar la seguridad, toque **Cambiar PIN para configuración**.
6. Pulse la casilla **Introducir nuevo PIN de configuración**. Mediante el teclado introduzca el nuevo PIN de 4 dígitos necesario para acceder a la configuración del sistema y toque **Aceptar**.

Como alternativa, para desactivar la configuración del PIN, toque **Borrar** para quitar los dígitos que ya se introdujeron. Toque **Aceptar** para guardar el cambio.

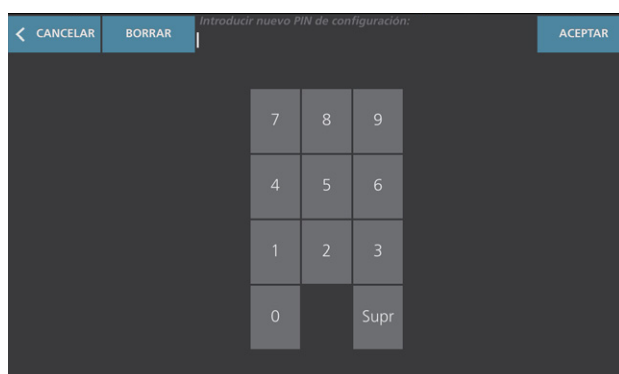

7. Toque la casilla **Confirmar nuevo PIN de configuración** y, a continuación, introduzca el mismo código que ha introducido anteriormente.
8. Toque **Guardar PIN para configuración**.

Uso del sistema



Lea la sección “[Advertencias y precauciones](#)” antes de realizar las siguientes tareas.

Medición del volumen vesical

Procedimiento 1. Preparación para el examen

Asegúrese de estar familiarizado con los iconos y las pantallas de la consola. Para obtener más información sobre los componentes y la interfaz de usuario del sistema, consulte el capítulo “[Introducción](#)” en la página 9.

1. Si se introduce una batería cargada en la consola y la pantalla táctil está en blanco, el sistema está apagado. Pulse el botón de **encendido/apagado** (🔌).

Si el sistema tiene una batería descargada o no se ha introducido una batería, inserte una batería cargada.

*Nota: Antes de insertar una batería en la consola, pulse el botón **Test (Probar)** y asegúrese de que la batería está completamente cargada. Si el nivel de carga de la batería se encuentra al 20 % o menos de su capacidad, sustitúyala por una batería completamente cargada antes de continuar. El sistema no puede realizar un examen mientras está conectado a la alimentación externa.*

2. Deje que el sistema se inicie. Cuando el sistema se haya iniciado completamente, aparece la pantalla de Inicio como se muestra en la imagen siguiente.



3. Compruebe el icono de la batería y asegúrese de que tenga carga suficiente.
4. Verifique que el sistema se ha limpiado correctamente de acuerdo con las instrucciones del capítulo “[Reprocesamiento](#)” en la página 56. En particular, asegúrese de que la pantalla táctil no está contaminada con gel, limpiador, desinfectante o cualquier otro residuo y que está completamente seca.


Procedimiento 2. Introducción de información sobre el paciente o el ID. del operador (opcional)

El sistema le deja introducir la información del paciente siguiente que se guardará con el examen y se puede imprimir en el informe del examen:

- ID del paciente
- Nombre
- Apellidos
- Sexo
- Fecha de nacimiento

El ID de Operador también puede actualizarse en este momento. Los campos ID del Paciente e ID del Operador aparecen en la parte superior de muchas pantallas. Puede tocar el campo y actualizar la información sobre el ID del Paciente o el ID del Operador cuando el campo esté visible.

1. En la pantalla Inicio, toque **ID del paciente**. Aparece la pantalla del ID de Paciente y Operador.

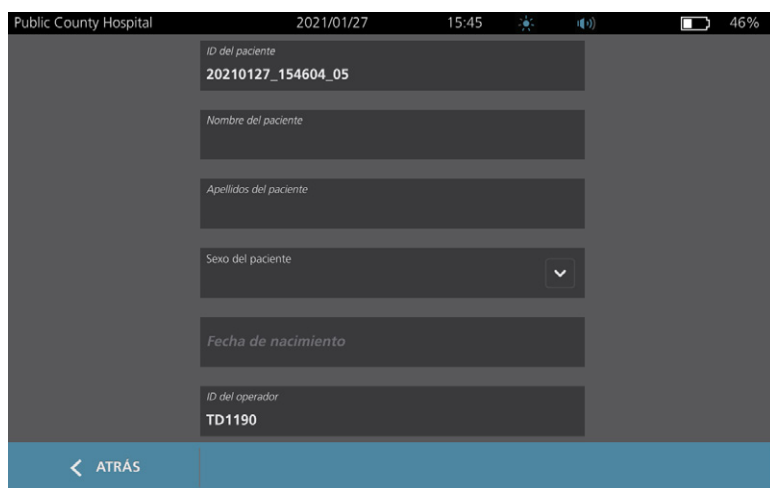

Public County Hospital 2021/01/27 15:45 46%

ID del paciente
20210127_154604_05

Nombre del paciente

Apellidos del paciente

Sexo del paciente

Fecha de nacimiento

ID del operador
TD1190

< ATRÁS

2. En la pantalla Datos de Paciente, toque **ID del paciente**, use el teclado virtual para escribir un valor y toque **Aceptar**.
3. Toque **Nombre del paciente** y a continuación, introduzca el nombre del paciente.
4. Toque **Apellidos del paciente** y a continuación, introduzca el apellido del paciente.
5. Toque **Sexo del paciente** y seleccione el sexo del paciente.
6. En el campo **Fecha de nacimiento**, pase el dedo verticalmente para cambiar un valor y, después, toque el nuevo valor para seleccionarlo. Repita la operación según sea necesario para definir el mes, día y año deseados.
7. Toque **ID del operador** y utilice el teclado virtual para introducir o actualizar la información que identifica al operador.
8. Cuando haya acabado de introducir la información del paciente, seleccione **Atrás**.

Procedimiento 3. Use un lector de código de barras para introducir un ID de paciente o de operador (opcional)

Con el lector de código de barras opcional, puede introducir los ID de los pacientes o los operadores leyéndolos en el sistema desde los códigos de barras impresos en las placas de ID, las pulseras de los pacientes, las gráficas y otros documentos similares.

1. En la pantalla de Inicio, toque la casilla **ID del paciente** o la casilla **ID del operador**. Aparece la pantalla del ID de Paciente y Operador.



The screenshot shows a mobile application interface for entering patient and operator information. At the top, the status bar displays 'Public County Hospital', the date '2021/01/27', the time '15:45', and a battery level of '46%'. The main form has a dark background with white text and input fields. The fields are: 'ID del paciente' with the value '20210127_154604_05', 'Nombre del paciente', 'Apellidos del paciente', 'Sexo del paciente' with a dropdown arrow, 'Fecha de nacimiento', and 'ID del operador' with the value 'TD1190'. At the bottom left, there is a blue button with a white arrow and the text 'ATRÁS'.

2. En la pantalla del ID de Paciente y Operador, toque la casilla **ID del paciente**.
3. Cuando aparece la pantalla del teclado, apunte el lector de código de barras hacia un código de barras que contenga el ID del paciente. Mantenga pulsado el gatillo para activar el lector.
4. Cuando el sistema vuelve a la pantalla del ID de Paciente y Operador, compruebe que se muestra aquí el ID del paciente.
5. Toque la casilla **ID del operador** y, a continuación, siga los pasos del Paso 3 al Paso 4 para introducir el ID del operador.
6. Toque **Atrás** para regresar a la pantalla de Inicio.
7. Vuelva a poner el lector de código de barras en su soporte de la estación de trabajo.


Procedimiento 4. Medición del volumen vesical

El sistema cuenta con una serie de funciones diseñadas para ayudar a localizar e identificar la vejiga. Estas funciones se pueden habilitar o deshabilitar de acuerdo con las instrucciones indicadas en “[Configuración de los ajustes de examen](#)” en la página 34:

- **Enfoque del modo B en directo:** el sistema muestra una vista ecográfica en tiempo real en modo B del abdomen del paciente, lo que le permite enfocar la sonda y localizar la vejiga antes de la exploración.
 - **Contorno vesical (BladderTraQ):** en las vistas del modo B, el sistema resalta los bordes detectados de la vejiga al marcar el área de la vejiga en color verde.
1. En la pantalla Inicio, seleccione si está colocado a la derecha o a la izquierda del paciente. No es necesario que especifique la edad o el sexo del paciente para obtener un resultado preciso.




2. El paciente debe estar tumbado en posición supina y con los músculos abdominales relajados. A continuación, palpe el hueso púbico.

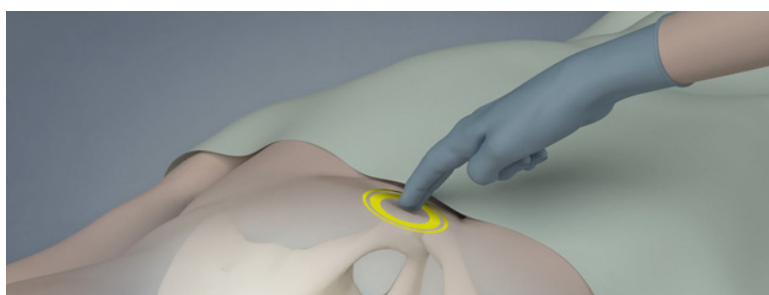


3. Ponga una cantidad generosa de gel de ecografía (con el menor número de burbujas posible) en la línea media del abdomen del paciente, aproximadamente 3 cm (1 pulg.) por encima del hueso púbico.




4. Sostenga la sonda agarrándola con el cable de la sonda y páselo por su muñeca y antebrazo.

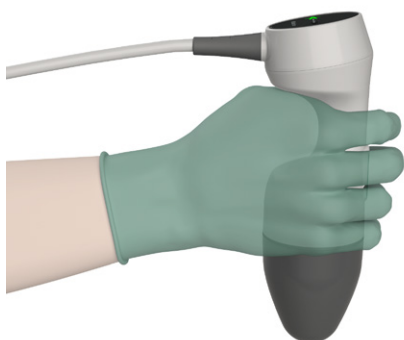


5. Presione suavemente la sonda en el abdomen inferior a través del gel. El cable de la sonda debe orientarse a 90 grados respecto del plano sagital del paciente.

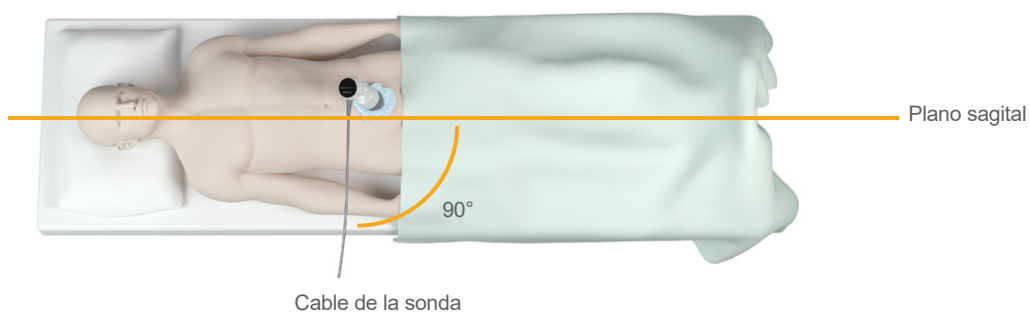

6. Mire los iconos de los indicadores de posición situados en la parte superior de la sonda. Asegúrese de que la cabeza del indicador de dirección iluminado apunta a la misma dirección que la cabeza del paciente.

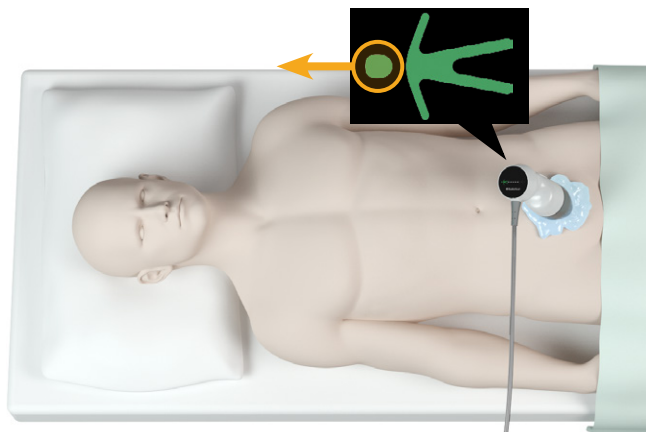

7. En el caso de los pacientes con obesidad, aleje de la sonda tanto tejido adiposo abdominal como sea posible. Aplique más presión a la sonda para reducir la cantidad de tejido adiposo que debe atravesar la ecografía, pero no aplique más presión de la necesaria.
8. Asegúrese de que no hay espacios de aire entre la sonda y la piel del paciente, y de que ejerce suficiente presión para mantener un contacto adecuado con la piel, hasta que finalice la exploración. Si es necesario, añada más gel para garantizar que el contacto sea adecuado.
9. Presione el botón de la sonda o toque **Explorar** en la pantalla de inicio.
- Si el enfoque del modo B en directo está activado, vaya al Paso 10.
 - Si el enfoque del modo B en directo está desactivado, mantenga la sonda estable mientras la exploración está en curso y, a continuación, siga con el procedimiento “[Revisión de los resultados de examen](#)”.
10. Si el enfoque del modo B en directo está activado, en la pantalla de la consola aparece una imagen ecográfica en tiempo real del modo B. Enfoque la vejiga haciendo lo siguiente:
- Gire la sonda lentamente desde la izquierda o la derecha del paciente hasta que el área oscura (la vejiga) esté centrada en la línea de color verde vertical en la pantalla de enfoque.
 - Una vez que se haya centrado la vejiga, gire la sonda ligeramente hacia arriba o abajo de la línea central del paciente para obtener el área oscura más grande posible.

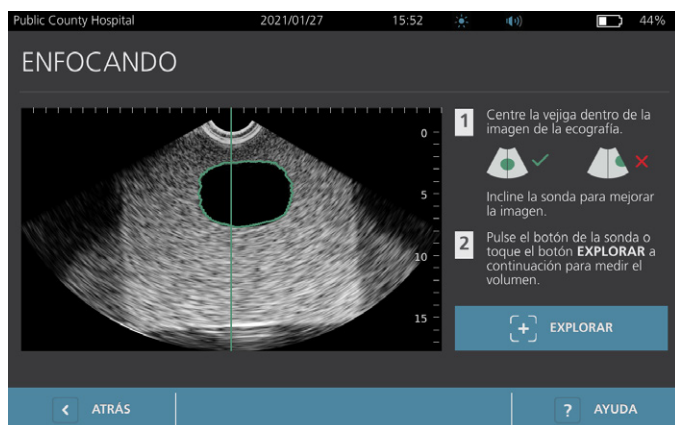

11. Cuando haya terminado de enfocar la sonda, pulse el botón de la sonda o toque **Explorar** en la pantalla. El proceso de exploración empieza.
12. Mantenga la sonda estable mientras que la exploración esté en curso. Cuando escuche un pitido, la exploración habrá finalizado. Continúe con el procedimiento “Revisión de los resultados de examen”.

Procedimiento 5. Revisión de los resultados de examen

En esta sección se describen los procedimientos que ocurren después de la exploración. Realice los procedimientos que sean aplicables para su instalación.

CONFIRMAR O AJUSTAR EL ENFOQUE

La técnica de enfoque puede influir en el resultado de medición de la vejiga. Cuando la vejiga queda parcialmente fuera del campo de visión ecográfico o está obstruida por el hueso púbico en ciertos ángulos de exploración, el volumen vesical real puede superar el resultado mostrado. Para ayudar a garantizar el grado superior de precisión, el sistema cuenta con diferentes funciones que facilitan la técnica de enfoque y confirmación.

1. Cuando aparece la pantalla Resultados, compruebe si aparece un símbolo mayor que (>) de color amarillo junto al volumen grabado y la vejiga se muestra de color amarillo. Si esto se produce, una parte de la vejiga estaba fuera del campo de visión ecográfico y el volumen vesical real puede superar el resultado mostrado. Debe enfocar la sonda de nuevo y volver a explorar al paciente. Para obtener información sobre cómo mejorar los resultados de la exploración, consulte la Tabla 9.

Figura 5. Se muestra el símbolo mayor que (>)


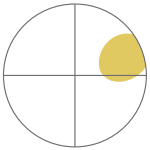



Figura 6. No se muestra el símbolo mayor que (>)




Tabla 9. Precisión de la medición de la vejiga


| RESULTADO | GUÍA PARA EL ENFOQUE | EJEMPLO |
|------------------------|---|---------|
| Centrada correctamente | Si la vejiga está centrada en el campo de visión con todos los bordes visibles y sin zonas sombreadas, entonces la exploración ha sido correcta y los resultados son lo más precisos posible. | |
| No centrada | Si la vejiga no está centrada en el campo de visión, puede mover o girar la sonda en la dirección de la vejiga en la pantalla para optimizar los resultados. | |

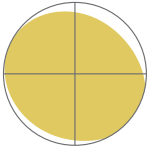

| RESULTADO | GUÍA PARA EL ENFOQUE | EJEMPLO |
|--------------------------------|--|---|
| EdgeScan | Si un lado de la vejiga no se encuentra en el campo de visión, una parte de la vejiga no se incluyó en la exploración. El sistema muestra un símbolo mayor que (>) delante del resultado medido, lo que indica que el volumen vesical real puede superar el resultado mostrado. Mueva o gire la sonda en la dirección de la vejiga en la pantalla para optimizar los resultados. |  |
| Vejiga más grande que la vista | Si más de un lado de la vejiga no se encuentra en el campo de visión, varias partes de la vejiga no se incluyeron en la exploración. El sistema muestra un símbolo mayor que (>) delante del resultado medido, lo que indica que el volumen vesical real puede superar el resultado mostrado. Puede intentar captar toda la vejiga; para ello, vuelva a explorar aplicando menos presión en el abdomen. Sin embargo, puede que la vejiga sea más grande que el campo de visión y puede que no sea posible captar toda la vejiga en la vista. |  |
| Interferencia del hueso púbico | Si aparece una zona sombreada, indica que el hueso púbico está en el campo de visión. Aunque la vejiga pueda estar centrada y la medición pueda haberse completado, es probable que el hueso púbico haya tapado una parte de la vejiga. El sistema muestra un símbolo mayor que (>) delante del resultado medido, lo que indica que el volumen vesical real puede superar el resultado mostrado. Puede mover o girar la sonda con el fin de optimizar los resultados. |  |

- Si desea repetir la exploración del paciente, en la pantalla Resultados, toque **Explorar**.
Repita el procedimiento de exploración si es necesario para ajustar el enfoque o confirmar la medición inicial.
- Cuando haya finalizado la exploración, podrá revisar los resultados en los modos B o C. (Se muestra el modo C por defecto). Puede guardar los resultados de exploración e imprimirlos si tiene una impresora instalada.

VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES EN EL MODO B

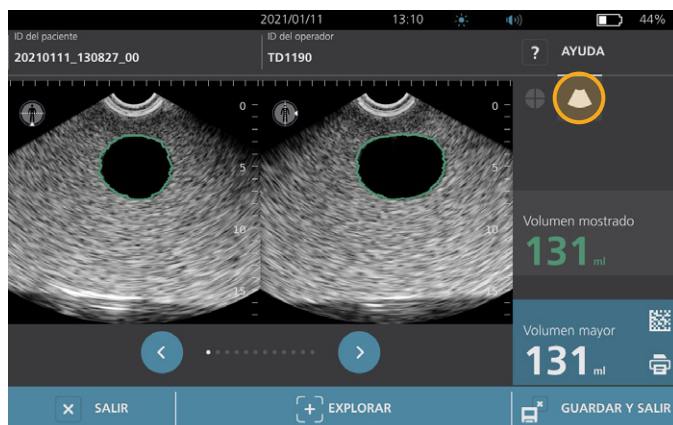- Si las imágenes del modo B están activadas en el sistema y quiere verlas, toque el icono **Modo B** . Aparecen las imágenes del modo B de la exploración en un panel doble.



- En la esquina superior izquierda de cada imagen del modo B, la línea que tacha un icono de figura humana indica el plano mostrado actualmente. Para navegar por los planos de la exploración, toque los iconos **Anterior**  y **Siguiente**  debajo de las imágenes.


VISUALIZACIÓN DE MÚLTIPLES EXPLORACIONES

Si realiza más de una exploración, la pantalla Resultados muestra el volumen más grande obtenido. Por encima de la medición de volumen más grande, la pantalla indica el volumen de exploración más reciente.


Nota: Si explora al paciente más de cinco veces durante el mismo examen, el sistema solo almacena los cinco volúmenes de exploración más recientes.




6. Si desea visualizar las mediciones de exploración individuales, toque la flecha **Hist. expl.**

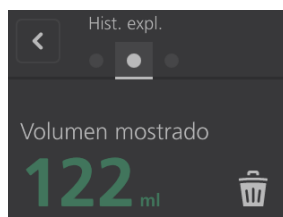

7. Toque el número de medición de exploración para ver la pantalla de exploración.

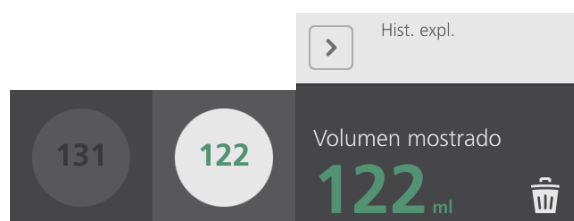






8. Para descartar la exploración en pantalla, toque el icono **Eliminar** .
9. Si desea transferir el resultado de la exploración a un sistema HCD o HCE utilizando un lector de código de barras, continúe con el procedimiento [“Generación de un código de barras que contenga el resultado de un examen”](#).

De lo contrario, omita el procedimiento [“Imprimir, guardar o salir de un examen activo”](#).


Procedimiento 6. Generación de un código de barras que contenga el resultado de un examen

Una vez que el sistema se haya configurado para generar códigos de barras, podrá visualizar un código de barras que contenga el resultado de exploración más grande del examen actual en la pantalla táctil de la consola. Luego, podrá usar un lector de código de barras para recoger el resultado de la exploración y transferirlo al sistema de registros médicos de su centro (que puede ser un sistema HCD o HCE).

Si esta función está activa, aparecerá un icono de código de barras junto al resultado más grande de exploración almacenado en el examen, justo encima del icono **Imprimir** . La apariencia exacta del icono coincide con el tipo de código de barras que muestra el sistema, el cual se selecciona durante la configuración.




1. En la pantalla Resultados, toque el icono **Código de barras**    . El código de barras y la cadena de texto que muestra el resultado exacto que contiene el código de barras aparece en un cuadro de diálogo en la pantalla.



2. En el sistema de registros médicos, busque el registro del paciente y seleccione el campo donde debe almacenarse el volumen vesical.
3. Use un lector de código de barras conectado al sistema de registros médicos para leer el código de barras que aparece en pantalla.
4. Toque el icono Cerrar  en el cuadro de diálogo para quitar el cuadro de diálogo de la pantalla.

Procedimiento 7. Imprimir, guardar o salir de un examen activo

Cuando finaliza el examen, puede realizar varias acciones desde la pantalla Resultados.

| Si desea... | Toque... |
|--|---|
| Registrar información del paciente | ID del paciente |
| Imprimir los resultados del examen | Mayúsculas  |
| Guardar los resultados del examen (el sistema almacena la medición más grande) | Guardar y salir  |
| Salir sin guardar los resultados del examen | Salir  |

Nota: Un informe de examen impreso siempre contiene la medición más grande y la fecha y la hora del examen, pero puede personalizar la información restante en el informe. Para obtener más información sobre cómo añadir y personalizar la información que se imprimirá, consulte [“Configuración de los ajustes para informes impresos y en PDF”](#) en la página 35.

Nota: Este es el último punto en el proceso de exploración en el que puede añadir o modificar información del paciente o el operador. Una vez que se guarda el examen, ya no es posible cambiar la información del paciente o el operador.

Para obtener información sobre cómo ver, eliminar y exportar las exploraciones guardadas, consulte la sección [“Gestión de exploraciones guardadas”](#) en la página 52.

Procedimiento 8. Visualización de ahorro de costes

El sistema calcula y muestra información relacionada con el ahorro de costes, los sondajes evitados y las ITU evitadas. Los ajustes predeterminados pueden personalizarse para reflejar las tarifas y los costes de su centro. Para obtener información sobre cómo personalizar las preferencias de ahorro, consulte “Personalización de los cálculos de ahorro de costes” en la página 36.

El sistema calcula el ahorro desde el último reinicio de cálculo y para toda la vida útil del sistema. Puede mostrar, configurar y reiniciar el ahorro de costes en cualquier momento.

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Configuración**.
2. Toque **Mostrar ahorro**. Se abre la pantalla de configuración con la pestaña Mostrar ahorro.



3. Si tiene una impresora y desea imprimir los cálculos de ahorro, toque **Imprimir**.
4. Cuando haya acabado de ver los cálculos de ahorro, toque **Atrás**. La consola vuelve a la pantalla Inicio.

Gestión de exploraciones guardadas

El sistema puede almacenar exámenes guardados en la memoria interna o en dispositivos externos como las unidades flash USB. Si explora al paciente varias veces durante un examen, el sistema guarda la medición más grande.

Si no hay dispositivos externos conectados, el sistema almacena los exámenes guardados en la memoria interna. Si se agota la memoria interna del sistema, se sobrescriben los exámenes más antiguos según sea necesario para hacer espacio para los nuevos. El sistema puede almacenar 600 exámenes en la memoria interna.

Si conecta una unidad USB, el sistema almacena los exámenes guardados en la unidad USB. Si hay poco espacio en la unidad USB conectada, el sistema le avisa para que pueda cambiar de unidad.

Puede mover los exámenes de la memoria interna a una unidad USB externa. Para obtener más información, consulte la sección “Exportación de exploraciones guardadas” en la página 54.



Lea la sección “Advertencias y precauciones” antes de realizar las siguientes tareas.

Procedimiento 1. Recuperación de un examen guardado

Después de haber guardado un examen, puede recuperarlo usando la pantalla Exámenes guardados. La pantalla Exámenes guardados muestra los resultados de los exámenes que se han guardado en la memoria interna del sistema si no se ha conectado ninguna unidad externa. Si conecta una unidad USB, la pantalla Exámenes guardados muestra los resultados de los exámenes guardados en la unidad conectada.

Si en un examen hay varios resultados de exploración, el sistema guarda solamente la medición más grande.

ORDENAR O DESPLAZARSE POR LAS EXPLORACIONES

1. En la pantalla Inicio, toque **Exámenes guardados**.
2. Si aparece un teclado, introduzca el PIN para Exámenes guardados y, a continuación, toque **Aceptar**.

Se abre la pantalla Exámenes guardados, en la que se muestra una lista de exámenes guardados en el soporte predeterminado. Cada una de las filas en esta lista corresponde a un examen.

| Fecha/hora | Resultado | ID del paciente | ID del operador | |
|------------------|-----------|--------------------|-----------------|--|
| 2021/01/11 12:03 | 131ml | 20210111_120316_07 | TD1190 | |
| 2021/01/11 11:56 | 122ml | 20210111_115656_05 | TD1190 | |
| 2021/01/11 11:52 | >115ml | 20210111_115420_01 | TD1190 | |
| 2021/01/11 11:50 | 131ml | 20210111_115024_00 | TD1190 | |
| 2021/01/11 11:29 | 122ml | 20210111_112947_00 | TD1190 | |

Barra de navegación inferior: ATRÁS | EXPORTAR EXÁMENES | AYUDA

3. Si quiere ordenar las exploraciones usando un valor distinto, toque un título de campo que pueda ordenarse.

Los títulos de campo le permiten ordenar la lista de exploraciones usando los campos siguientes. Las columnas pueden ordenarse en orden ascendente o descendente. El campo por el que se está ordenando actualmente aparece resaltado de color blanco y aparece un icono de flecha indicando la dirección del orden al lado de la etiqueta de la columna.

- Fecha/hora
 - ID del paciente
 - ID del operador
4. Si desea desplazarse por la lista de exámenes, deslice la pantalla en vertical (de arriba a abajo o de abajo a arriba).
 5. Si quiere ver un examen, toque en cualquier parte en la fila del examen. Cuando selecciona un examen para revisarla, aparece la pantalla de resultados para el examen.

Procedimiento 2. Eliminación de un examen guardado

1. En la pantalla Inicio, toque **Exámenes guardados**.
2. Si aparece un teclado, introduzca el PIN para Exámenes guardados y, a continuación, toque **Aceptar**.

Se abre la pantalla Exámenes guardados, en la que se muestra una lista de exámenes guardados en el soporte predeterminado. Cada una de las filas en esta lista corresponde a un examen.



| Fecha/hora | Resultado | ID del paciente | ID del operador | |
|------------------|-----------|--------------------|-----------------|--|
| 2021/01/11 12:03 | 131ml | 20210111_120316_07 | TD1190 | |
| 2021/01/11 11:56 | 122ml | 20210111_115656_05 | TD1190 | |
| 2021/01/11 11:52 | >115ml | 20210111_115420_01 | TD1190 | |
| 2021/01/11 11:50 | 131ml | 20210111_115024_00 | TD1190 | |
| 2021/01/11 11:29 | 122ml | 20210111_112947_00 | TD1190 | |

3. Si no aparece en la lista, ordene o desplácese por los exámenes guardados para ver el que desee. Para obtener información sobre cómo buscar exploraciones, consulte [“Recuperación de un examen guardado”](#) en la página 52.
4. Toque el icono **Eliminar** en el extremo derecho de la fila del examen.
5. En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione **Sí**.

*Nota: Es posible que quiera eliminar un examen guardado que está visualizando actualmente. Para eliminar un examen abierto, en la parte inferior de la pantalla, toque el icono **Eliminar**.*

Procedimiento 3. Exportación de exploraciones guardadas


Utilice este procedimiento para mover exámenes de la memoria interna del sistema a una unidad USB externa.

Por defecto, los resultados de exámenes guardados se conservan en la memoria interna del sistema. Al insertar una unidad USB en la consola, el sistema empieza a leer inmediatamente los resultados de los exámenes guardados en la unidad nueva. Si no se han guardado exámenes en la unidad externa, la pantalla Exámenes guardados aparece en blanco. Sin embargo, los resultados de exámenes en la memoria interna del sistema no se pierden y pueden exportarse a la unidad nueva. Tras exportar los exámenes, el sistema los elimina de la memoria interna.

Los exámenes se guardan con nombres de archivo únicos, por lo que al guardar los nuevos exámenes no se sobrescriben los que ya están almacenados en la unidad USB.

La información de examen exportada se almacena en formato PDF, para poder visualizarla en otros dispositivos. Cada documento de examen se almacena en una carpeta por separado en la unidad USB e incluye la información siguiente:

- Información del paciente
 - Vista en modo C de la exploración (si la imagen de crucetas del modo C está activada en los informes)
 - Vistas en modo N de la exploración (si las imágenes del modo B están activadas en los informes)
1. Inserte una unidad USB en un puerto USB disponible en la consola. Si no hay puertos disponibles, desconecte un dispositivo USB, como un lector de código de barras.
 2. Si el sistema muestra un mensaje que le aconseja comprobar que la unidad USB no está dañada, retire la unidad del puerto. Repita el Paso 1 con otra unidad USB.
 3. En la pantalla Inicio, toque **Exámenes guardados**.
 4. Si aparece un teclado, introduzca el PIN para Exámenes guardados y, a continuación, toque **Aceptar**.
 5. En la pantalla Exámenes guardados, toque **Exportar exámenes**.

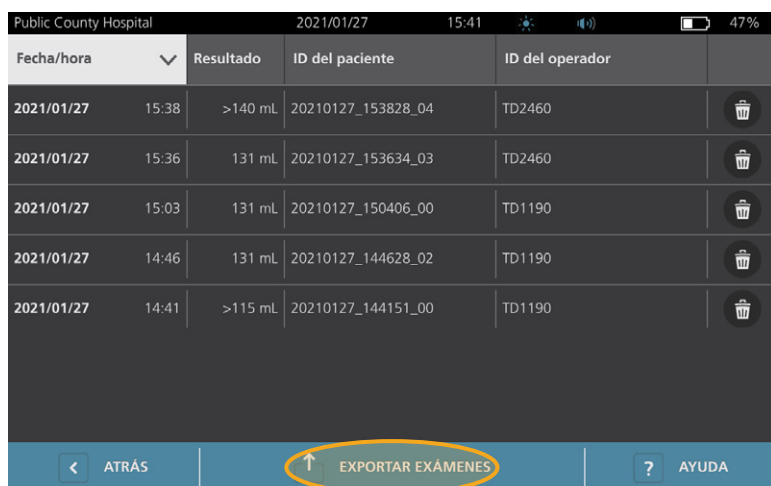

| Fecha/hora | Resultado | ID del paciente | ID del operador |
|------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| 2021/01/27 15:38 | >140 mL | 20210127_153828_04 | TD2460 |
| 2021/01/27 15:36 | 131 mL | 20210127_153634_03 | TD2460 |
| 2021/01/27 15:03 | 131 mL | 20210127_150406_00 | TD1190 |
| 2021/01/27 14:46 | 131 mL | 20210127_144628_02 | TD1190 |
| 2021/01/27 14:41 | >115 mL | 20210127_144151_00 | TD1190 |

6. En la pantalla de verificación que aparece, toque **Sí** para confirmar que desea mover los exámenes almacenados en la consola a la unidad USB. No retire la unidad hasta que se haya completado la exportación.
7. Si ha desconectado un dispositivo USB en el paso 1, retire la unidad USB y vuelva a conectar el dispositivo.

Reprocesamiento



Lea la sección “[Advertencias y precauciones](#)” antes de realizar las siguientes tareas.

La limpieza y la desinfección del sistema BladderScan i10 son elementos importantes de su uso y mantenimiento. Antes de cada uso, compruebe que todos los componentes del sistema se hayan limpiado y desinfectado siguiendo las instrucciones de la Tabla 10.

Nota: Se considera que todos los elementos de la siguiente tabla se utilizarán de la manera prevista.

Tabla 10. Requisitos de reprocesamiento para el sistema BladderScan i10

| COMPONENTE | NIVELES DE REPROCESAMIENTO NECESARIOS | | |
|---------------------|---------------------------------------|------|------|
| | Limpio | Bajo | Alto |
| Consola | ✓ | | |
| Cable de la sonda | ✓ | | |
| Sonda | | ✓ | |
| Impresora | ✓ | | |
| Estación de trabajo | ✓ | | |

Los niveles de reprocesamiento que se muestran en esta tabla hacen referencia a las clasificación de Spaulding/CDC.

Limpiadores y desinfectantes

Eficacia de la desinfección

En la Tabla 11 se muestran las clases de desinfectantes de bajo nivel (LLD, por sus siglas en inglés) que han demostrado ser eficaces con el sistema. Para obtener más información sobre el efecto a largo plazo de soluciones en los materiales del sistema, consulte “[Compatibilidad](#)”.

Tabla 11. Desinfectantes validados

| CLASE DE INGREDIENTE ACTIVO | INGREDIENTES ACTIVOS ANALIZADOS |
|--------------------------------|---|
| Alcoholes (o alcohol con Quat) | Alcohol isopropílico al 55 % |
| Cloro o compuestos de cloro | Hipoclorito de sodio al 0,55 % (lejía) |
| Amoniaco cuaternario (Quat) | Compuestos de amoniaco cuaternario al 0,5 % |
| Peróxido de hidrógeno | Peróxido de hidrógeno al 2,0 % |

Compatibilidad

Tabla 12 muestra los productos desinfectantes y de limpieza que han demostrado ser compatibles con los materiales del sistema. Los resultados con soluciones compatibles pueden variar en función de los periodos de exposición y el manejo del sistema. No se ha analizado la eficacia biológica de estas soluciones.

Verathon no puede garantizar la compatibilidad de las soluciones no incluidas en la Tabla 12. Asegúrese de que observa el programa de inspección descrito en “[Inspecciones periódicas](#)” en la página 60.

La disponibilidad de los productos de limpieza y desinfección varía según el país, por lo que Verathon no puede probar los productos de todos los mercados. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon o con el representante local. Para obtener información de contacto, visite verathon.com/service-and-support.

Tabla 12. Soluciones de limpieza y desinfectantes compatibles

| PRODUCTO | CLASE ACTIVA | USO | |
|--|-----------------------------------|--------|--------------|
| | | Limpio | Desinfectado |
| GAMA Healthcare Clinell Universal Wipes | Amonio cuaternario | ■ | ■ |
| Toallitas germicidas de lejía Clorox Healthcare | Cloro o compuestos de cloro | ■ | ■ |
| Toallitas de peróxido de hidrógeno Clorox Healthcare | Peróxido de hidrógeno con alcohol | ■ | ■ |
| Diversey Oxivir TB | Peróxido de hidrógeno acelerado | ■ | ■ |
| Metrex CaviCide | Alcohol con amoniaco cuaternario | ■ | ■ |
| Metrex CaviCide1 | Alcohol con amoniaco cuaternario | ■ | ■ |
| Metrex CaviWipes | Alcohol con amoniaco cuaternario | ■ | ■ |
| Metrex CaviWipes1 | Alcohol con amoniaco cuaternario | ■ | ■ |
| Micro-Scientific Micro-Kleen3 | Alcohol con amoniaco cuaternario | ■ | ■ |
| PDI Sani-Cloth AF3 | Amonio cuaternario | ■ | ■ |
| PDI Sani-Cloth Active | Amonio cuaternario | ■ | ■ |
| Lejía PDI Sani-Cloth | Cloro o compuestos de cloro | ■ | ■ |
| PDI Sani-Cloth Plus | Alcohol | ■ | ■ |
| PDI Super Sani-Cloth | Alcohol | ■ | ■ |
| Septiwipes | Amonio cuaternario | ■ | ■ |
| Tristel Duo para ecografía | Cloro o compuestos de cloro | ■ | ■ |
| Virusolve+ | Alcohol | ■ | ■ |
| Excel de Wip'Anios | Alcohol con amoniaco cuaternario | ■ | ■ |

Prácticas recomendadas e instrucciones


Limpieza es la eliminación de agentes contaminantes o suciedad visible, y *desinfección* es el proceso de destruir agentes patógenos o convertirlos en inertes. Durante la limpieza, asegúrese de eliminar todas las materias extrañas. Esto permite que los ingredientes activos del desinfectante lleguen a todas las superficies.

Al limpiar y desinfectar el sistema o sus accesorios, siga estas prácticas recomendadas:

- No deje que el gel u otros contaminantes se sequen en el sistema. Esto complica la eliminación.
- Cámbiese de guantes si se ensucian claramente.
- Limpie siempre de una superficie limpia a una superficie sucia.
- Al limpiar, trate de superponer los movimientos lo menos posible.
- Si una toallita se seca o se ensucia, cámbielo por otro limpio.
- No reutilice las toallitas secas o sucias.

Procedimiento 1. Limpieza y desinfección de la consola, la sonda y el cable

LIMPIEZA DE LA CONSOLA, LA SONDA Y EL CABLE

1. Si el sistema está encendido, pulse el botón de **encendido/apagado** . Cuando se le solicite, confirme que desea apagar el sistema y espere hasta que esto suceda.
2. Retire todo el gel de ecografía de la sonda.
3. Utilice una solución o paño mencionados como limpiador en la Tabla 12 para limpiar la consola, la sonda y el cable de la sonda de acuerdo con las instrucciones que proporciona el fabricante del limpiador. (Si está usando una solución, aplíquela con una toalla limpia). Repita el procedimiento según sea necesario para asegurarse de eliminar toda la contaminación visible.
4. Si la consola todavía está húmeda, puede usar un paño suave limpio o un papel absorbente para eliminar los residuos de la solución de limpieza. Espere a que la pantalla táctil se seque por completo antes de usarla.




DESINFECCIÓN DE LA SONDA

5. Use una toallita germicida con una clase de ingrediente activo de la Tabla 11 para limpiar la cúpula de la sonda de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante del paño.

Vuelva a limpiar tantas veces como sea necesario para mantener el componente visiblemente húmedo durante todo el período de exposición. Puede usar tantos paños como necesite.
6. Deje que la sonda se seque al aire por completo. La limpieza y la desinfección están completas y el sistema está listo para su uso.



Procedimiento 2. Limpieza de la impresora (opcional)

1. Si el sistema está encendido, pulse el botón de **encendido/apagado** . Cuando se le solicite, confirme que desea apagar el sistema y espere hasta que esto suceda.
2. Use un paño húmedo o un paño indicado para la limpieza de dispositivos médicos para limpiar la impresora de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante del paño. Repita el procedimiento según sea necesario para asegurarse de eliminar toda la contaminación visible.
3. Si la impresora todavía está húmeda, puede usar un paño suave limpio o un papel absorbente para eliminar los residuos de la solución de limpieza.



Mantenimiento y seguridad

Inspecciones periódicas

Verathon ofrece servicios de certificación a través de los representantes de servicio técnico de BladderScan autorizados o un centro de servicio de Verathon. El servicio de certificación incluye procesos exhaustivos de inspección y pruebas del sistema. Para obtener más información, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado de Verathon, con su distribuidor local de BladderScan o con el servicio de atención al cliente de Verathon.

INSPECCIONES SEMANALES

Debe comprobar que no existen daños ni grietas en los siguientes componentes del sistema una vez a la semana:

- Consola
- Sonda
- Cable de la sonda
- Impresora
- Cable de la impresora
- Estación de trabajo
- Adaptador de alimentación
- Cable eléctrico
- Cable de alimentación
- Batería o baterías
- Enchufes

Si se producen grietas, puede entrar líquido en la consola o la sonda, lo que podría tener un impacto negativo en el rendimiento del sistema. Además de los procesos de mantenimiento descritos en este manual, las reparaciones y las visitas de servicio técnico deben ser realizadas por un representante de servicio técnico autorizado de BladderScan o un centro de servicio de Verathon. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon o con el representante local.

Información sobre seguridad del sistema

Para mantener la seguridad y privacidad del paciente, Verathon recomienda seguir estas prácticas:

- Solo debe permitir el acceso físico al sistema a los operadores autorizados.
- Establezca los intervalos de Desconexión automática y de Tiempo de inactividad en la duración más corta posible.
- Mantenga configurados el PIN para configuración y el PIN para exámenes guardados.
- No utilice la misma cadena de dígitos para el PIN para configuración y el PIN para exámenes guardados.
- No utilice un PIN que sea fácil de adivinar. Por ejemplo, no configure ninguno de los dos PIN con una secuencia de dígitos, como 2345, o con cadenas de un solo dígito, como 1111.
- Proporcione el PIN para exámenes guardados únicamente a las personas que necesiten acceder a la información de los exámenes.
- Proporcione el PIN para configuración únicamente a las personas que cuenten con autorización para establecer el PIN para exámenes guardados y para configurar los sistemas BladderScan.
- Una vez que haya copiado los exámenes guardados de una unidad USB a una ubicación de almacenamiento permanente, elimine los exámenes de la unidad USB.
- Antes de comenzar un examen, asegúrese de que todas las unidades USB se hayan desconectado del sistema.
- Desactive los puertos USB si no se van a utilizar.
- Cuando termine de configurar el sistema o de revisar los exámenes guardados, vuelva a la pantalla Inicio.

Calibración

El sistema no necesita una calibración rutinaria o periódica si se hace un uso normal del mismo.

Si su centro o las regulaciones regionales exigen un mantenimiento periódico, consulte el procedimiento [“Ejecución de una prueba CaliScan”](#) en la página 66, que se puede usar para confirmar la funcionalidad adecuada de la sonda.

Software del sistema

Verathon puede lanzar actualizaciones de software para el sistema. Las actualizaciones de software son suministradas directamente por Verathon o un representante de autorizado. Para obtener información sobre cómo actualizar el software del dispositivo, consulte [“Actualización del software”](#) en la página 65.

No instale actualizaciones de software de terceros ni intente modificar el software existente. De lo contrario, pueden producirse daños en el sistema y anular la garantía.

Eliminación del dispositivo

El sistema y los accesorios pueden contener aceites minerales, baterías y otros materiales peligrosos para el medio ambiente. Cuando el sistema haya alcanzado el fin de su vida útil, devuelva el sistema y los accesorios relacionados a un centro de servicio de Verathon para una eliminación adecuada. También puede seguir los protocolos locales para la eliminación de residuos peligrosos.

Garantía

La información sobre la garantía del fabricante se incluye con el producto. Puede haber disponibles garantías extendidas para su sistema. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon o con su representante local.

Procedimientos de mantenimiento

Procedimiento 1. Carga de papel térmico en la impresora (opcional)



Lea la sección “[Advertencias y precauciones](#)” antes de realizar la siguiente tarea.

1. Deslice la puerta de la impresora hacia arriba para desbloquearla y gírela para abrirla. Podrá abrir la puerta más fácilmente si coloca el pulgar fuera de la impresora y aprieta.
2. Si es la primera vez que carga la impresora, puede que haya una lámina de papel en el mecanismo de impresión. Quite la lámina de papel.
3. Coloque un rollo de papel térmico dentro de la puerta, como se indica, de forma que el extremo suelto del papel salga por la parte superior del rollo.



4. Sostenga el extremo del papel de forma que sobresalga de la parte superior de la impresora y, después, cierre la puerta de la impresora. Compruebe que la puerta hace un clic al encajar en su sitio.



5. Arranque cualquier exceso de papel que sobresalga de la impresora. Para obtener mejores resultados, coloque el papel en diagonal, empezando el corte en un lado del papel y acabando en el otro.

Procedimiento 2. Realización de un autodiagnóstico

La función de autodiagnóstico del sistema BladderScan i10 completa una prueba de autodiagnóstico en lo siguiente:

- Memoria interna (y cualquier dispositivo externo, si lo hubiera)
- Componentes de hardware, incluida la consola, la batería interna, la sonda y la impresora, si está conectada
- Software BladderScan i10

1. En la pantalla Inicio, seleccione el icono **Configuración** y, después, toque **Autodiagnóstico**. La pantalla Configuración se abre en la pestaña Autodiagnóstico, donde el sistema efectúa el autodiagnóstico y muestra los resultados.



2. Desplácese por los resultados de prueba que aparecen en pantalla pasando el dedo verticalmente en la pantalla táctil.
3. Si la pantalla indica pruebas fallidas o resultados anómalos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon o con su representante local.
4. Si desea imprimir los resultados del autodiagnóstico, toque **Imprimir**.
5. Cuando haya acabado de ver los resultados de la prueba, seleccione **Atrás**. La consola vuelve a la pantalla Inicio.

Procedimiento 3. Actualización del software

De vez en cuando, Verathon puede poner disponibles actualizaciones de software para su sistema. Para consultar la disponibilidad de una actualización de software, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o con el representante local.

Nota: Si los puertos USB del sistema suelen estar desactivados por motivos de seguridad, deberá activarlos antes de realizar este procedimiento y desactivarlos de nuevo una vez finalizado. Para obtener información sobre cómo activar y desactivar los puertos USB, consulte “Apagado y encendido de los puertos USB” en la página 71.



1. Exporte cualquier examen que quiera conservar. Para obtener más información, consulte la sección “Exportación de exploraciones guardadas” en la página 54.

Nota: Asegúrese de que la exportación se ha completado antes de continuar.

2. Asegúrese de que la sonda está conectada a la consola.
3. Si hay unidades USB conectadas a la consola, retírelas.
4. Asegúrese de que la carga de la batería es de al menos un 20 %.
5. Si el sistema está conectado a la alimentación externa, desconéctelo.
6. Cuando aparezca la pantalla Inicio y el icono de exploración esté disponible, inserte una unidad USB que contenga un paquete de actualización de software válido en uno de los dos puertos USB más grandes de la consola. Si no hay puertos disponibles, desconecte un dispositivo USB, como un lector de código de barras.

Si el sistema muestra un mensaje que le aconseja comprobar que la unidad USB no está dañada, retire la unidad del puerto. Repita el Paso 6 con otra unidad USB.



7. Si aparece un teclado, introduzca el PIN para configuración y, a continuación, pulse **Aceptar**.
8. Cuando el sistema le pregunte si desea actualizar el software, toque **Actualizar ahora**.
El sistema inicia la actualización y puede que se reinicie durante el proceso de actualización. No extraiga la batería ni la unidad USB mientras la actualización está en curso.
9. Cuando el sistema le solicite un reinicio, pulse el botón de **encendido/apagado**  y manténgalo pulsado durante medio segundo aproximadamente. Cuando se le pregunte si desea apagar el sistema, toque **Sí**.
10. Pulse el botón de **encendido/apagado**  para volver a encender el sistema.
11. Cuando el sistema le notifique que el software se ha actualizado, toque **Aceptar**. Si aparece la pantalla Inicio, pase al Paso 13.
12. Si el sistema le solicita repetir los pasos del 8 al 11, repítalos.
13. Desconecte la unidad USB de la consola. Si ha desconectado un dispositivo USB en el Paso 6, vuelva a conectarlo.

Procedimiento 4. Ejecución de una prueba CaliScan

El sistema BladderScan i10 incluye la prueba *CaliScan*, que prueba los componentes mecánicos de la sonda y el funcionamiento del transductor. Esta prueba se puede usar para el mantenimiento preventivo o como herramienta de diagnóstico si una sonda se ha caído o ha estado almacenada durante un periodo prolongado de tiempo.

Nota: La prueba CaliScan evalúa solo la condición mecánica de la sonda. El sistema BladderScan i10 no requiere calibración como parte del mantenimiento programado habitual.

1. Asegúrese de que el sistema BladderScan i10 está desconectado de la alimentación externa.
2. En la pantalla de Inicio, toque **Configuración** y, a continuación, toque **Autodiagnóstico**.
3. Toque **CaliScan™**.



4. Revise las instrucciones de la prueba y seleccione **Prueba**. El sistema empieza a realizar la prueba en los componentes de la sonda. Aparece un mensaje y un indicador de proceso mientras la prueba está en curso.

Nota: Una vez que haya empezado la prueba, no pulse el botón de encendido/apagado, desconecte la sonda de la consola o conecte la alimentación externa a la consola.





5. Proceda de acuerdo con el mensaje que aparece en pantalla.

| <i>Si el mensaje indica que ...</i> | <i>Entonces ...</i> |
|-------------------------------------|--|
| La sonda ha superado la prueba | Cuando haya terminado de ver los resultados, toque Atrás . |
| La sonda no ha superado la prueba | Reinicie el sistema y vuelva a realizar la prueba. Si la prueba sigue fallando, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon o con el representante local. |


Procedimiento 5. Apagado del sistema

1. Si está realizando un examen, guarde la información del examen.

Nota: Si omite este paso e intenta apagar el sistema durante un examen, el sistema le indicará que confirme que desea continuar sin guardar los resultados del examen.


2. Pulse el botón de **encendido/apagado**  y manténgalo pulsado durante medio segundo aproximadamente.
3. Cuando aparezca un cuadro de diálogo en pantalla y le pregunte si desea apagar el sistema, suelte el botón de **encendido/apagado** .
4. Toque **Sí** para confirmar que desea apagar el sistema.

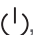

Procedimiento 6. Apagado incondicional

Si resulta necesario por motivos de emergencia o resolución de problemas, puede apagar el sistema incondicionalmente. El sistema interrumpe todos los procesos de emergencia y los apaga de inmediato. La próxima vez que pulse el botón de **encendido/apagado** , habrá una espera de varios segundos antes de que aparezca la pantalla de Inicio.

IMPORTANTE

Si el sistema muestra los resultados de un examen no guardado, guarde el examen antes de continuar. Puede apagar el sistema por completo mientras evalúa un examen no guardado, pero si lo hace, se perderá la información del examen.


1. Coloque un dedo sobre el botón de **encendido/apagado**  y manténgalo pulsado durante al menos 1,5 segundos. Aparecerá un indicador de apagado en la esquina inferior izquierda de la pantalla. La barra de progreso que se encuentra dentro del indicador se acorta progresivamente mientras el sistema espera comenzar con la rutina de apagado.

*Nota: La primera vez que pulsa el botón de **encendido/apagado** , aún se encuentra disponible la opción para apagar el sistema normalmente y el sistema muestra el cuadro de diálogo que le pregunta si desea apagarlo de esa manera. Mientras el indicador de apagado está encendido en la pantalla, al quitar el dedo del botón de **encendido/apagado**  se cancela el apagado.*



2. Mantenga el dedo sobre el botón de **encendido/apagado**  hasta que la pantalla táctil de la consola quede en negro y el LED ubicado junto al botón de **encendido/apagado**  ya no esté iluminado.

IMPORTANTE

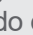Si el sistema no responde en absoluto, puede apagarlo colocando un dedo o el pulgar sobre el botón de **encendido/apagado**  y manteniéndolo pulsado durante al menos 6 segundos. Sin embargo, si apaga el sistema de esa manera, es posible que se pierda parte de la información almacenada.

Procedimiento 7. Copiar la configuración del sistema en otros sistemas

Una vez que haya configurado un sistema BladderScan i10 con la configuración que desea usar en el centro, puede copiar la configuración del primer sistema a todos los demás.

Nota: Los dos procedimientos siguientes copian todos los ajustes, excepto la placa de identificación del sistema original, si el sistema de destino tiene la misma versión de software instalada. De lo contrario, si el sistema de destino está ejecutando una versión más antigua del software con una estructura de configuración diferente, los procesos copian la configuración compatible con esa versión del software, excepto para la placa de identificación.

EXPORTAR LA CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA A UNA UNIDAD FLASH USB

1. Inserte una unidad USB en blanco en un puerto USB disponible de la consola. Si no hay puertos disponibles, desconecte un dispositivo USB, como un lector de código de barras.
Si el sistema muestra un mensaje que le aconseja comprobar que la unidad USB no está dañada, retire la unidad del puerto. Repita el Paso 1 con otra unidad USB.
2. En la pantalla de Inicio, seleccione **Configuración**.
3. En la pantalla Configuración, toque la pestaña **Administración**.
4. Si aparece un teclado, introduzca el PIN para configuración y, a continuación, pulse **Aceptar**.
5. En la pestaña Administración, toque **Exportar la configuración a USB**.
6. Cuando se le pregunte si desea exportar la configuración, toque **Sí**.
7. Cuando el indicador de progreso desaparezca, desconecte la unidad USB de la consola.
8. ha desconectado un dispositivo USB en el paso 1, vuelva a conectar el dispositivo.
9. Toque el botón **Atrás** dos veces. De esta manera, regresará a la pantalla de Inicio.

IMPORTAR UNA CONFIGURACIÓN A OTRO SISTEMA

Cuando el sistema detecta que se ha conectado una unidad USB, lee la unidad para buscar un archivo de configuración. Si lo encuentra, procede automáticamente con la importación de la configuración. Como resultado, puede aplicar una configuración exportada a otro sistema simplemente conectando la unidad USB que contiene la configuración.

No comience a importar una configuración si alguno de los siguientes enunciados es verdadero:

- El sistema está realizando una exploración o no se ha guardado un examen.
 - El sistema está ocupado.
 - Ya se ha conectado otra unidad USB.
 - La batería del sistema tiene menos del 20 % de la carga.
1. Inserte una unidad USB en blanco en un puerto USB disponible de la consola. Si no hay puertos disponibles, desconecte un dispositivo USB, como un lector de código de barras.
 2. En caso necesario, encienda el sistema.

3. Espere a ver si aparece uno de los siguientes mensajes:
 - La configuración de ajustes en la unidad USB es idéntica a la del sistema y no necesita modificarse.
 - La configuración de ajustes en la unidad USB no es compatible con el sistema.

| <i>Si ...</i> | <i>Entonces ...</i> |
|--------------------------------------|---|
| Aparece uno de estos mensajes | Toque Aceptar y, a continuación, retire la unidad USB de la consola. |
| No aparece ninguno de estos mensajes | Continúe al Paso 4. |

4. Si se le ha avisado de que la configuración de ajustes de la unidad USB es de una versión de software diferente de la del sistema, toque **Sí** o **No** para seleccionar si seguir o no importando la configuración.

| <i>Si toca ...</i> | <i>Entonces ...</i> |
|--------------------|---|
| Sí | Espere a que el sistema termine de importar la configuración compatible. |
| No | Extraiga la unidad USB de la consola. Si ha desconectado un dispositivo USB en el Paso 1, vuelva a conectar el dispositivo. |

5. Retire la unidad USB de inmediato después de que haya importado la nueva configuración y se haya reiniciado. Si ha desconectado un dispositivo USB en el Paso 1, vuelva a conectar el dispositivo.

Procedimiento 8. Apagado y encendido de los puertos USB

IMPORTANTE

Si hay una impresora conectada, no puede operarla a menos que los puertos USB estén activos.

Si es necesario, puede desactivar y reactivar los puertos USB siguiendo este procedimiento.

1. En la pantalla de Inicio, seleccione **Configuración**.
2. En la pantalla Configuración, toque la pestaña **Administración**.
3. Si aparece un teclado, introduzca el PIN para configuración y, a continuación, pulse **Aceptar**.



4. En la pestaña Administración, toque **Gestionar la seguridad**.
5. En el cuadro de diálogo Gestionar la seguridad, toque la casilla de verificación **Habilitar puertos USB** para marcarla o desmarcarla.
6. Toque el botón **Atrás** dos veces. De esta manera, regresará a la pantalla de Inicio.

Ayuda y resolución de problemas

Recursos de ayuda

Procedimiento 1. Consulte del tutorial integrado

El sistema BladderScan i10 incluye un tutorial integrado con instrucciones sobre cómo explorar y gestionar exámenes. Se recomienda ver el tutorial antes de usar el sistema. El tutorial no incluye pista de audio.

*Nota: Las pantallas de ajuste y configuración incluyen acceso al texto de ayuda específico de cada pantalla. Para ver el texto de ayuda en cualquier pantalla de ajuste o configuración, toque **Ayuda**.*

1. Toque el botón correspondiente en la pantalla que se está mostrando. Se abre la pantalla Control de tutorial y se inicia la reproducción del tutorial.

| <i>En...</i> | <i>Toque...</i> | <i>El tutorial se inicia en...</i> |
|--------------------------------|-----------------|---|
| La pantalla de Inicio | Tutorial | El comienzo |
| La pantalla Resultados | Ayuda | La sección sobre visualización y almacenamiento de resultados |
| La pantalla Exámenes guardados | Ayuda | La sección sobre la revisión de exámenes guardados |

Mientras se reproduce el tutorial, podrá realizar estas acciones:

- Ver el fotograma anterior del tutorial (seleccione **Anterior**)
 - Ver el siguiente fotograma del tutorial (seleccione **Siguiente**)
 - Pausar el tutorial (seleccione **Pausa**) o reanudar el tutorial cuando está pausado (seleccione **Reproducir**)
2. Cuando haya terminado de ver el tutorial, seleccione **Salir**.

Procedimiento 2. Consulta del vídeo de formación integrado

El sistema BladderScan i10 incluye un vídeo de formación disponible en varios idiomas. Dicho vídeo muestra cómo empezar a usar el sistema y cómo realizar un examen habitual.

*Nota: Si el vídeo de formación integrado no está disponible en el idioma seleccionado, el icono de **Vídeo** no aparecerá en la pantalla Inicio.*

1. Si es necesario, vuelva a la pantalla Inicio.

2. Seleccione **Vídeo**.

Mientras se reproduce el vídeo, podrá realizar estas acciones:

- Avanzar la reproducción 5 segundos (seleccione **Saltar adelante**)
- Retroceder la reproducción 5 segundos (seleccione **Saltar atrás**)
- Ajustar la posición de la reproducción (toque la pantalla y, a continuación, arrastre el botón de la barra de posición)
- Pause el vídeo (toque **Pausa**) o continúe el vídeo cuando esté pausado (toque **Reproducir**)

3. Cuando haya terminado de ver el vídeo de formación, seleccione **Salir**.

Recursos de servicio al cliente

Verathon proporciona varios recursos de servicio al cliente, como se describe en la Tabla 13.

Tabla 13. Recursos de servicio al cliente para sistemas BladderScan i10

| RECURSO | DESCRIPCIÓN |
|------------------------------|---|
| Unidad USB de uso | Unidad USB incluida en su sistema que incluye instrucciones sobre cómo usarlo. |
| Vídeo de formación integrado | Puede acceder a un breve clip de vídeo disponible en varios idiomas sobre cómo usar el sistema pulsando Vídeo en la pantalla Inicio. |
| Tutorial de ayuda integrado | Puede acceder a un módulo de formación instalado en su sistema BladderScan pulsando Ayuda en las pantallas de Inicio, Enfoque y Resultados. |
| Texto de ayuda integrado | Puede ver texto de ayuda en línea específico de cada pantalla pulsando Ayuda desde las pantallas de ajuste y configuración. |
| Asistencia telefónica | Consulte la lista de recursos del servicio de atención al cliente de Verathon disponibles en verathon.com/service-and-support |

Reparaciones

Los componentes del sistema no pueden ser reparados por el usuario. Verathon no facilita ningún tipo de esquema de los circuitos, listas de piezas de componentes, descripciones u otra información que pudiera ser necesaria para la reparación del dispositivo o los accesorios relacionados. Un técnico cualificado debe realizar el servicio. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon o con su representante local.



Lea la sección “Advertencias y precauciones”.

Procedimientos de resolución de problemas

Procedimiento 1. Resolución de problemas de la batería de la consola

1. Si el sistema no se enciende, es posible que la batería esté averiada o simplemente descargada. Para determinar la condición de la batería, intente recargarla de acuerdo con las instrucciones del procedimiento “Carga de la batería” en la página 27.
2. Si no puede recargar la batería pero hay una segunda batería disponible, extraiga la primera batería e inserte la segunda. Si es necesario, cambie la segunda batería de acuerdo con las instrucciones en el procedimiento “Carga de la batería” en la página 27 y, a continuación, verifique que el sistema funciona normalmente.
3. Si el sistema no responde a estos pasos de resolución de problemas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon.

Procedimiento 2. Resolución de problemas de conexión de la sonda

Si la sonda no funciona o si la consola muestra un mensaje de error indicando que la sonda no está conectada, utilice este procedimiento para resolver el problema.

1. Compruebe si la alimentación externa está conectada. Si lo está, desconéctela. Si eso no resuelve el problema, continúe con el Paso 2.
2. Si es necesario, pulse el botón de **encendido/apagado** (⏻). Cuando se le solicite, confirme que desea apagar el sistema y luego espere hasta que esto suceda.
3. Pulse el botón de **encendido/apagado** (⏻) otra vez para activar el sistema.
4. Si el mensaje vuelve a aparecer y tiene una batería extra, repita el Paso 2. Sustituya la batería de acuerdo con las instrucciones del procedimiento “[Inserción de una batería](#)” en la página 25, y luego repita el Paso 3.
5. Si el mensaje no desaparece, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon.


Procedimiento 3. Resolución de problemas de enfoque de la sonda

Siga este procedimiento para solucionar los siguientes problemas:


- La exploración de enfoque inicial no es correcta.
 - La imagen de enfoque está descentrada, pero al mover la sonda en la dirección esperada de la vejiga, la imagen se aleja más del centro.
1. En la pantalla Inicio, compruebe que la posición seleccionada refleje de forma precisa su posición en relación con el paciente.




2. Sostenga la sonda agarrándola con el cable de la sonda y páselo por su muñeca y antebrazo.

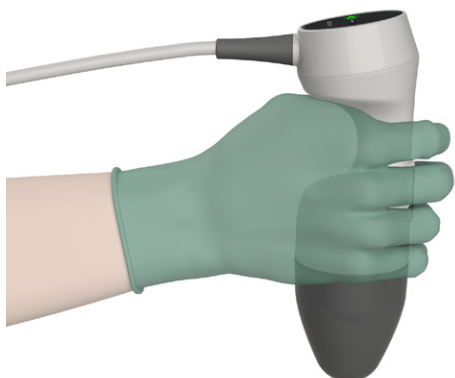

3. Con la línea media de la sonda en el paciente, compruebe que el cable de la sonda está orientado a 90 grados del plano sagital.

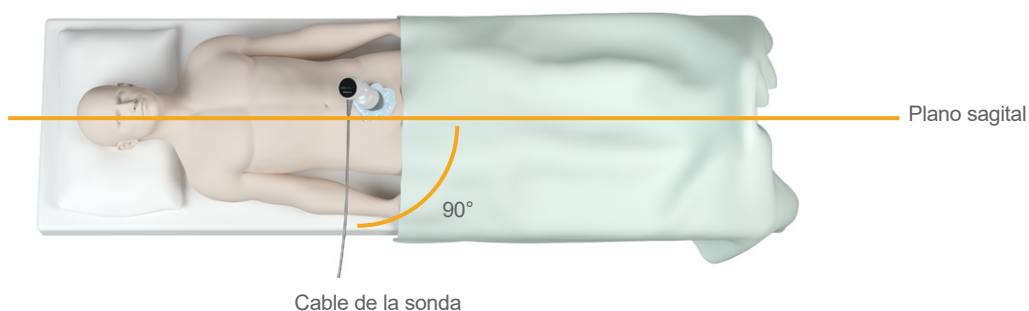

4. Mire los iconos de los indicadores de posición situados en la parte superior de la sonda. Asegúrese de que la cabeza del indicador de dirección iluminado apunta a la misma dirección que la cabeza del paciente.

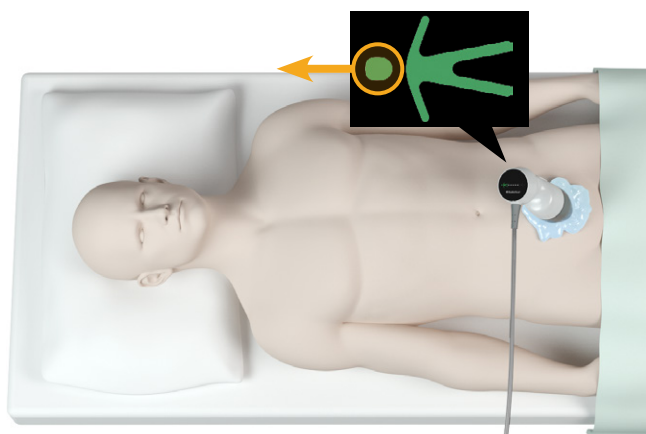

5. Después de verificar la orientación seleccionada, la colocación de la sonda y la visualización de la sonda, repita la exploración en el paciente. Mantenga la sonda estable mientras que la exploración esté en curso. Para obtener instrucciones detalladas, consulte "Medición del volumen vesical" en la página 43.

Procedimiento 4. Restaurar valores de fábrica

Utilice este procedimiento para restablecer los ajustes originales del sistema. Este procedimiento elimina toda la información del usuario (incluidos los ajustes personalizados del sistema, los cálculos de ahorro de costes y los exámenes guardados) del sistema. No restablezca los ajustes predeterminados de fábrica si desea conservar esta información.

1. En la pantalla Inicio, seleccione **Configuración** y, después, **Administración**.
2. Si aparece un teclado, introduzca el PIN para configuración y, a continuación, pulse **Aceptar**.
3. Toque **Restaurar configuración predeterminada**.
4. Si desea restaurar los valores predeterminados del sistema, seleccione **Sí**. El sistema restaura los ajustes predeterminados de fábrica y, después, se reinicia.


Procedimiento 5. Resolución de problemas de impresiones irregulares (opcional)




Lea la sección “[Advertencias y precauciones](#)” antes de realizar la siguiente tarea.

Si la impresora está produciendo impresiones irregulares, puede que tenga que limpiar el cabezal de impresión.

1. Si es necesario, pulse el botón de **encendido/apagado** (⏻). Cuando se le solicite, confirme que desea apagar el sistema y luego espere hasta que esto suceda.
2. Deslice la puerta de la impresora hacia arriba para desbloquearla y gírela para abrirla. Podrá abrir la puerta más fácilmente si coloca el pulgar fuera de la impresora y aprieta.
3. Si hay un rollo de papel térmico en la impresora, sáquelo.

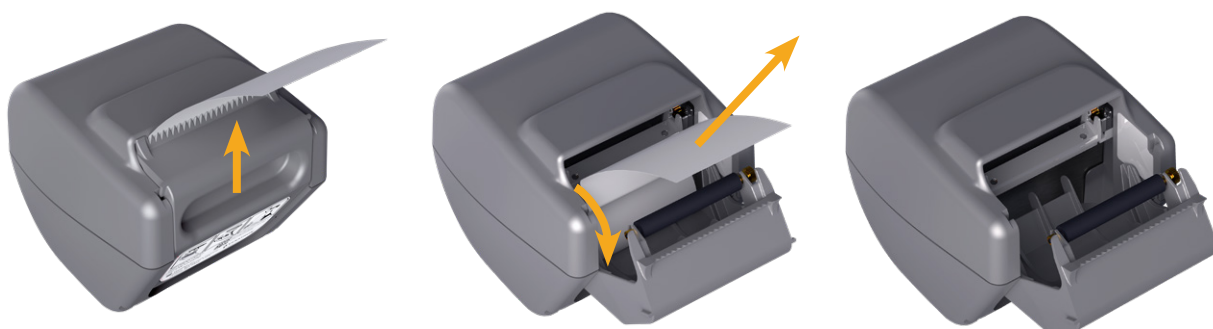

4. Utilice un algodón humedecido en alcohol isopropílico (IPA) para limpiar toda la longitud del cabezal de impresión. No utilice los dedos ni superficies duras o abrasivas para limpiar el cabezal de impresión.

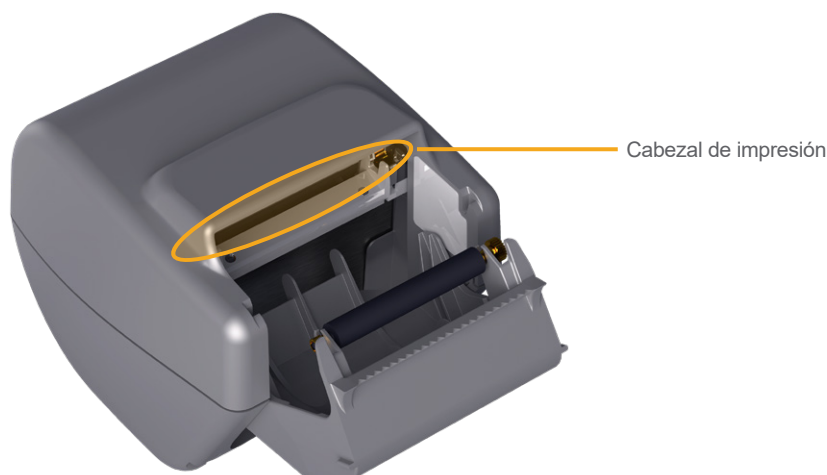

5. Deje que el cabezal de impresión se seque por completo.
6. Asegúrese de que no haya pelusas ni residuos visibles en el cabezal de impresión.

7. Verifique la posición del rodillo de accionamiento de la impresora en la puerta de la impresora:
 - Los casquillos de plástico del rodillo de la impresora deben estar apoyados dentro de los pasadores de plástico de color gris claro en la puerta de la impresora como se muestra. El engranaje debe estar fuera del pasador.
 - Si el rodillo de accionamiento de la impresora se ha salido de los pasadores de color gris, cambie el rodillo siguiendo las instrucciones del procedimiento [“Sustitución del rodillo de accionamiento de la impresora \(opcional\)”](#) en la página 81.



8. Cargue el papel térmico y cierre la puerta de la impresora siguiendo las instrucciones del procedimiento [“Carga de papel térmico en la impresora \(opcional\)”](#) en la página 63.
9. Si la impresora sigue produciendo impresiones irregulares, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon.

Procedimiento 6. Desatascado de papel (opcional)

Si la impresora está atascada, siga este procedimiento para eliminar el atasco de papel.

1. Si es necesario, pulse el botón de **encendido/apagado** (⏻). Cuando se le solicite, confirme que desea apagar el sistema y luego espere hasta que esto suceda.
2. Deslice la puerta de la impresora hacia arriba para desbloquearla y gírela para abrirla. Podrá abrir la puerta más fácilmente si coloca el pulgar fuera de la impresora y aprieta.



3. Tire con suavidad del papel para eliminar el atasco de papel. Si es necesario, tire de los trozos de papel doblado para sacarlos de la impresora y saque todos los trozos de papel que se hayan desgarrado del rodillo.
4. Verifique la posición del rodillo de accionamiento de la impresora en la puerta de la impresora:
 - Los casquillos de plástico del rodillo de la impresora deben estar apoyados dentro de los pasadores de plástico de color gris claro en la puerta de la impresora como se muestra. El engranaje debe estar fuera del pasador.
 - Si el rodillo de accionamiento de la impresora se ha salido de los pasadores de color gris, cambie el rodillo siguiendo las instrucciones del procedimiento [“Sustitución del rodillo de accionamiento de la impresora \(opcional\)”](#) en la página 81.



5. Cargue el papel térmico y cierre la puerta de la impresora siguiendo las instrucciones del procedimiento [“Carga de papel térmico en la impresora \(opcional\)”](#) en la página 63.
6. Si el papel fuera de la impresora se desgarró o rompió, tire de él hacia un lado para facilitar su corte.
7. Si no puede eliminar el atasco de papel o la impresora sigue atascándose, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon.


Procedimiento 7. Sustitución del rodillo de accionamiento de la impresora (opcional)

El rodillo de accionamiento de la impresora puede desprenderse de su sitio si la impresora se cae. Si el rodillo se ha caído, la impresión será irregular o no ocurrirá. Es posible que no pueda cerrar la puerta de la impresora.

1. Si es necesario, pulse el botón de **encendido/apagado** (⏻). Cuando se le solicite, confirme que desea apagar el sistema y luego espere hasta que esto suceda.
2. Deslice la puerta de la impresora hacia arriba para desbloquearla, gire la puerta hacia abajo para abrirla y, después, saque el rollo de papel.



3. Observe el rodillo de accionamiento de la impresora dentro de los pasadores de plástico de color gris claro en la puerta de la impresora.
4. Si el rodillo de accionamiento de la impresora se ha caído, vuelva a colocarlo tal como se indica. El engranaje debe encontrarse del lado derecho visto desde el frente de la impresora y los casquillos plásticos deben estar centrados entre los pasadores de color gris claro en la puerta de la impresora.

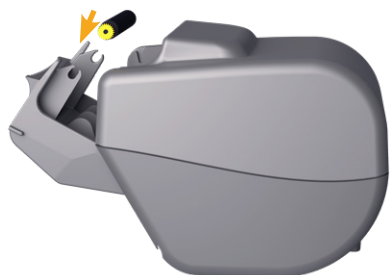

5. Presione el rodillo de accionamiento de la impresora para fijarlo. Compruebe que encaja en los pasadores de color gris claro en la puerta de la impresora. Verifique también que queda bien fijado en su sitio a ambos lados.



6. Cargue el papel térmico y cierre la puerta de la impresora siguiendo las instrucciones del procedimiento “Carga de papel térmico en la impresora (opcional)” en la página 63.
7. Si la impresora sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon.

Procedimiento 8. Evaluación de los mensajes de error de la consola

La Tabla 14 menciona las acciones iniciales que debe realizar si aparece uno de los mensajes de error de la tabla en la pantalla principal del sistema. Si no puede corregir el error, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon para obtener otras instrucciones.

Tabla 14. Mensajes de error frecuentes de la consola

| TEXTO DEL MENSAJE | PASOS DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS |
|--|--|
| La consola está demasiado caliente. Apague el sistema y deje que la batería se enfríe. | Apague el sistema, desconecte la alimentación externa y espere a que la batería regrese a una temperatura normal. |
| La consola está demasiado caliente y puede apagarse si la temperatura aumenta. | Apague el sistema y espere a que la batería regrese a una temperatura normal. |
| Batería sobrecargada. Apague el sistema y póngase en contacto con Verathon. | Apague el sistema y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon. |
| Versiones de software incompatibles. Póngase en contacto con Verathon. | Asegúrese de estar usando el sistema con su sonda original. |
| | Si se ha enviado la sonda al servicio técnico y ha vuelto con una unidad USB de actualización de software, instálela. |
| Desenchufe el sistema de la toma de corriente para comenzar la exploración. | Desconecte la alimentación externa del sistema antes de iniciar la exploración. La sonda no funciona mientras la alimentación está conectada. |
| Desenchufe el sistema de la toma de corriente para reanudar la exploración. | Desconecte la alimentación externa del sistema hasta que haya guardado y completado el examen. La sonda no funciona mientras la alimentación está conectada. |
| No se ha detectado ninguna sonda. Conecte una sonda para comenzar la exploración. | Compruebe la conexión entre la sonda y la consola para asegurarse de que sea segura. |
| No se ha detectado ninguna sonda. Conecte una sonda para reanudar la exploración. | |
| Pérdida de los datos ecográficos. | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon. |
| Error de flujo de datos. A la exploración le faltan algunos datos ecográficos. | |
| Error del transductor. Es posible que la sonda no capture datos ecográficos. | |

| | |
|--|---|
| Error de motor de sonda. Es posible que la exploración no haya capturado completamente la vejiga. | Intente realizar la exploración de nuevo y confirme si sigue apareciendo el error. |
| | Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon. |
| La exploración no identificó una vejiga. | Asegúrese de que la sonda esté en contacto de forma segura con el paciente, que esté usando gel suficiente y que la sonda esté correctamente ubicada. |
| Dispositivo de almac. externo extraído. Se usará el almac. interno. | Compruebe la conexión entre la unidad flash USB y la consola. Como alternativa, use otra unidad flash USB. |
| Espacio de almacenamiento insuficiente. Borre exámenes o inserte un dispositivo de almacenamiento. | Transfiera los archivos más antiguos de la unidad flash USB a un ordenador y, a continuación, elimine esos archivos de la unidad flash USB, antes de conectar la unidad a la consola. Como alternativa, use otra unidad flash USB. |

Especificaciones del producto

Especificaciones del sistema

Especificaciones generales del sistema

Tabla 15. Especificaciones generales del sistema

| ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN | |
|---|----------------------------------|------|
| Especificaciones generales | | |
| Clasificación | Alimentado internamente, tipo BF | |
| Vida útil prevista del producto | 7 años | |
| Protección frente a la entrada de agua (IP) | Consola | IPX2 |
| | Sonda | IPX4 |
| | Impresora | IPX0 |
| | Adaptador de alimentación | IP22 |
| | Batería | IPX0 |
| Condiciones de funcionamiento | | |
| Uso | Interior | |
| Temperatura | De +10 a +40 °C (de 50 a 104 °F) | |
| Humedad relativa | Del 20 al 75 % | |
| Presión del aire ambiente | +700 hPa–1060 hPa | |
| Condiciones de almacenamiento | | |
| Uso | Interior | |
| Temperatura | De -10 a +60 °C (de 14 a 140 °F) | |
| Humedad relativa | Del 15 al 85 % | |
| Presión del aire ambiente | +600 hPa–1060 hPa | |

Tabla 16. Parámetros de salida acústicos de los ultrasonidos (estándar CEI)

| ETIQUETA DE ÍNDICE | | MI | TIS | | TIB | | TIC |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----|
| | | | EN LA SUPERFICIE | DEBAJO DE LA SUPERFICIE | EN LA SUPERFICIE | DEBAJO DE LA SUPERFICIE | |
| Valor de índice máximo* | | 0,433 | 2,21 × 10 ⁻³ | | — | — | — |
| Valor índice de componente | | | 2,21 × 10 ⁻³ | 2,21 × 10 ⁻³ | — | — | |
| Parámetros acústicos | $p_{r,\alpha}$ a z_{MI} | (MPa) | 0,652 | | | | |
| | P | (mW) | | 0,854 | — | — | — |
| | $P_{1 \times 1}$ | (mW) | | 0,205 | — | — | |
| | z_s | (cm) | | | | 3,3 | |
| | z_b | (cm) | | | | | — |
| | z_{MI} | (cm) | 3,3 | | | | |
| | $z_{pii,\alpha}$ | (cm) | 3,3 | | | | |
| | f_{awf} | (MHz) | 2,27 | 2,27 | | — | — |
| Otra información | prr | (Hz) | 408 | | | | |
| | srr | (Hz) | 5,1 | | | | |
| | n_{pps} | | 1 | | | | |
| | $I_{pa,\alpha}$ a $z_{pii,\alpha}$ | (W/cm ²) | 11,3 | | | | |
| | $I_{spta,\alpha}$ a $z_{pii,\alpha}$ o $z_{sii,\alpha}$ | (mW/cm ²) | 0,165 | | | | |
| | I_{spta} a z_{pii} o z_{sii} | (mW/cm ²) | 0,277 | | | | |
| | p_r a z_{pii} | (MPa) | 0,844 | | | | |
| Condiciones de funcionamiento | Pulso de 2,6 MHz | ● | ● | ● | | | |

* Los valores del índice mecánico (MI) y del índice térmico (TI) se encuentran por debajo de 1,0.

Tabla 17. Parámetros de salida acústicos de los ultrasonidos (formato FDA)

Los datos en cada columna corresponden al valor máximo global medido más alto para cada uno de los parámetros en el título de la columna (MI, $I_{SPTA.3}$, $I_{SPPA.3}$), medido para tres sondas.

| SALIDA ACÚSTICA | | | MI | $I_{SPTA.3}$ (mW/cm ²) | $I_{SPPA.3}$ (W/cm ²) | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Valor máximo global ¹ | | | 0,455 | 0,181 | 12,2 | |
| Parámetro acústico asociado | $p_{r.3}$ | (MPa) | 0,682 | | | |
| | P_0 | (mW) | | 0,863 | 0,863 | |
| | f_c | (MHz) | 2,29 | 2,29 | 2,29 | |
| | z_{sp} | (cm) | 3,40 | | 3,40 | |
| | Dimensiones del haz | x_{-6} (cm) | | | | 0,401 |
| | | y_{-6} (cm) | | | | 0,401 |
| | PD | (μ s) | 0,753 | | 0,753 | |
| | PRF | (Hz) | 408 | | 408 | |
| | EDS | Az. (cm) | | | 5,25 | |
| Ele. (cm) | | | | 1,28 | | |

* Los valores del índice mecánico (MI) y del índice térmico (TI) se encuentran por debajo de 1,0.

Especificaciones de la precisión

Tabla 18. Especificaciones de la precisión

| ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | |
|------------------------------|-------------------|--------------|
| Rango de volúmenes vesicales | 0 a 999 ml | |
| Precisión de volumen | superior a 100 ml | $\pm 7,5 \%$ |
| | 0–100 ml | $\pm 7,5$ ml |

En los ejemplos siguientes se muestra cómo los intervalos de precisión mostrados en Tabla 18 pueden influir en las mediciones del volumen comunicadas.

- Si la medición es superior a 100 ml, el intervalo de precisión es $\pm 7,5 \%$ y se calcula de la manera siguiente:
 $240 \text{ ml} \times 7,5 \% = 18 \text{ ml}$
 $240 \pm 18 \text{ ml} = \mathbf{222\text{--}258 \text{ ml}}$
- Si la medición es 0–100 ml, el intervalo de precisión es $\pm 7,5$ ml y se calcula de la manera siguiente:
 $80 \text{ ml} \pm 7,5 \text{ ml} = \mathbf{73\text{--}88 \text{ ml}}$ (redondeado al número entero más próximo)

Las especificaciones sobre la precisión se basan en que el sistema se utiliza según las instrucciones de Verathon en una exploración de un modelo con tejidos equivalentes.

Mientras que el umbral superior del rango de precisión sea 999 ml, el sistema puede detectar y mostrar volúmenes de vejiga superiores a 999 ml. Verathon no puede garantizar la precisión de las mediciones fuera de las especificaciones declaradas.

Especificaciones de los componentes

Tabla 19. Consola BladderScan i10 (0570-0412)

| ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN |
|------------------------------------|---|
| Especificaciones generales | |
| Alto | 206 mm (8,10 pulg.) |
| Ancho | 269 mm (10,59 pulg.) |
| Profundidad | 69 mm (2,70 pulg.) |
| Peso | 1800 g (3,97 lb) |
| Pantalla | 1280 x 800 píxeles |
| Especificaciones eléctricas | |
| Entrada | Batería suministrada por Verathon, 10,8 V CC |
| Salida | Puertos USB, 5 V CC a 100 mA máximo desde cada puerto |
| Aislamiento | Tipo BF |

Tabla 20. Adaptador de alimentación de la consola BladderScan i10 (0400-0156)

| ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|------------------------------------|--|
| Especificaciones eléctricas | |
| Tensión de entrada | 100–240 V CA, monofase |
| Frecuencia de entrada | 50–60 Hz |
| Corriente de entrada | 1,5 A máx |
| Conexión de entrada | Conexión CEI C13, enchufe de cable de línea NEMA 5-15 (Norteamérica), AS 3112 (Australia), CEE 7/4 (Europa), BS 1363 (Reino Unido) |
| Salida | 19 V CC/3,15 A/60 W máx. |
| Aprobaciones | CEI 60601-1 |

Tabla 21. Sonda BladderScan i10 (0570-0413)

| ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN |
|--------------------------------------|---|
| Especificaciones generales | |
| Alto | 194 mm (7,64 pulg.) |
| Ancho | 61 mm (2,40 pulg.) |
| Profundidad | 89 mm (3,50 pulg.) |
| Peso | 470 g (1,04 lb) |
| Cable | 1,88 m (6,17 pies) |
| Especificaciones mecánicas | |
| Resistencia funcional a los impactos | Supera una prueba de caída de la sonda que cumple o supera una distancia de 1,2 m (4 ft) a una superficie de acero según la norma MIL-STD 810H. |

Tabla 22. Impresora BladderScan i10 (0800-0640)

| ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------------------|--|
| Especificaciones generales | |
| Alto | 106 mm (4,17 pulg.) |
| Ancho | 103 mm (4,06 pulg.) |
| Profundidad | 122 mm (4,80 pulg.) |
| Peso (sin papel) | 460 g (1,01 lb) |
| Resolución | 8 puntos/mm (203 puntos/pulg.) |
| Tamaño de punto | 0,125 mm por 0,12 mm (0,005 pulg. por 0,005 pulg.) |
| Anchura de impresión | 48 mm (1,89 pulg.), o 384 puntos/línea |

Especificaciones de la batería

El sistema incluye una batería de ion de litio. En la pantalla táctil se muestra siempre el icono de una batería que indica la cantidad de alimentación restante y cuándo debe cambiarse o recargarse la batería. Si ha adquirido baterías adicionales y el cargador de baterías opcional, puede cambiar la batería siempre que sea necesario.

Cumpla las recomendaciones e instrucciones siguientes:

- Use solamente la consola o el cargador de baterías Verathon opcional. Si utiliza otros cargadores, las baterías podrían dañarse.
- Use solamente los modelos de baterías descritos en esta sección.
- Considere la posibilidad de reemplazar la batería si el tiempo entre cargas de la batería se reduce considerablemente y está afectando su uso del sistema BladderScan i10. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Verathon o con el representante local para cambiar las baterías.

Tabla 23. Batería (0400-0155)

| CONDICIÓN | DESCRIPCIÓN | |
|------------------------------------|---|---------------------|
| Especificaciones generales | | |
| Tipo de batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Alto | 23 mm (0,89 pulg.) | |
| Ancho | 151 mm (5,94 pulg.) | |
| Profundidad | 59 mm (2,32 pulg.) | |
| Peso | 326 g (0,72 lb) | |
| Especificaciones eléctricas | | |
| Vida útil de la batería | Una batería cargada por completo suele proporcionar 24 horas de uso normal entre cargas | |
| Tiempo de carga (típica) | Carga inicial (15 %-99 %) | 4 horas |
| | Carga mínima (listo para el primer uso, 5 %-20 %) | 30 minutos |
| | Recarga típica (5 %-80 %) | 2 horas, 45 minutos |
| Capacidad nominal | 6,4 Ah, 70 Wh | |
| Tensión nominal | 10,8 V | |
| Tensión máxima de carga | 12,6 V | |

Nota: Si tiene la batería 4,6 Ah/51 Wh (referencia 0400-0126) que se envió con un sistema BladderScan Prime o BladderScan Prime Plus antiguo, también puede usarla con el sistema BladderScan i10. Sin embargo, tenga en cuenta que necesitará recargarla con más frecuencia por su menor capacidad de carga.

Especificaciones del cargador de baterías

Nota: El cargador de baterías es un accesorio opcional.

Tabla 24. Cargador de baterías (0400-0157)

| ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|------------------------------------|---|
| Especificaciones generales | |
| Alto | 58 mm (2,30 pulg.) |
| Ancho | 124 mm (4,89 pulg.) |
| Profundidad | 175 mm (6,89 pulg.) |
| Peso | 385 g (0,85 lb) |
| Especificaciones eléctricas | |
| Tensión de entrada | 24 V CC |
| Frecuencia de entrada | CC |
| Corriente de entrada | 2,5 A |
| Conexión de entrada | 2,5 mm (0,1 pulg.), centro positivo |
| Salida | 18 V CC máx, 4 A máx |
| Aislamiento | Clase de protección III |
| Fusibles | Fusibles no sustituibles por el usuario |

Nota: El cargador de baterías BladderScan Prime Plus (referencia 0400-0130) cumple las mismas especificaciones que el cargador de baterías suministrado con el BladderScan i10. Puede usarse para cargar las baterías BladderScan i10.

Tabla 25. Adaptador de alimentación del cargador de baterías

| ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|------------------------------------|--|
| Especificaciones eléctricas | |
| Tensión de entrada | 100–240 V CA, monofase |
| Frecuencia de entrada | 50–60 Hz |
| Corriente de entrada | 1,4 A máx |
| Conexión de entrada | Conexión CEI C13, enchufe de cable de línea NEMA 5-15 (Norteamérica), AS 3112 (Australia), CEE 7/4 (Europa), BS 1363 (Reino Unido) |
| Salida | 24 V CC / 0–2,71 A |
| Aislamiento | 10 megaohmios para 500 V CC |
| Fusibles | Protección automática de sobretensión (OVP), protección de cortocircuito (SCP), protección de sobrecorriente (OCP) |

Especificaciones de la estación de trabajo

En Tabla 26, deben añadirse conjuntamente las cargas de trabajo máximas de cada componente; además, la suma de ambas cargas debe ser inferior o igual que la carga de trabajo total máxima de la estación de trabajo en su totalidad.

| CARGA EN BANDEJA | CARGA EN CONTENEDOR | CARGA TOTAL | ACEPTABLE |
|------------------|---------------------|------------------|-----------|
| 2,0 kg (4,41 lb) | 2,5 kg (5,51 lb) | 4,5 kg (9,92 lb) | ✓ |
| 4,5 kg (9,92 lb) | Ninguna | 4,5 kg (9,92 lb) | ✓ |
| Ninguna | 4,5 kg (9,92 lb) | 4,5 kg (9,92 lb) | ✓ |
| 2,5 kg (5,51 lb) | 2,5 kg (5,51 lb) | 5 kg (11,02 lb) | ✗ |

Nota: La estación de trabajo es un accesorio opcional.

Tabla 26. *BladderScan i10 Estación de trabajo (0800-0631)*

| ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | |
|--|--------------------------|------------------|
| Especificaciones generales | | |
| Alto | 1556 mm (61,26 pulg.) | |
| Diámetro de la base | 627 mm (24,67 pulg.) | |
| Altura (estación de trabajo, consola, sonda, impresora, adaptador de alimentación y carga de trabajo total máxima) | 23 kg (50,7 lb) | |
| Carga de trabajo total máxima | 4,5 kg (9,92 lb) | |
| Carga de trabajo máxima por componente | Bandeja | 4,5 kg (9,92 lb) |
| | Contenedor accesorio | 4,5 kg (9,92 lb) |

Compatibilidad electromagnética

El sistema está diseñado de acuerdo con la norma CEI 60601-1-2 sobre los requisitos relativos a la compatibilidad electromagnética (CEM) de los equipos electromédicos. Los límites de emisiones e inmunidad especificados en esta normativa están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias nocivas en una instalación médica típica.

El sistema cumple con los requisitos del uso básico pertinentes que se detallan en las normativas CEI 60601-1 y CEI 60601-2-37. Los resultados de las pruebas de inmunidad demuestran que el uso básico del sistema no se ve afectado por las condiciones de las pruebas que se describen en las siguientes tablas. Para obtener más información acerca del uso básico de los sistemas, consulte “Uso básico” en la página 1.

Emisiones electromagnéticas

Tabla 27. Guía y declaración del fabricante: Emisiones electromagnéticas

El sistema está pensado para su uso en un entorno electromagnético similar al que se indica a continuación. Los clientes o los usuarios del sistema deben asegurarse de utilizarlo en tales condiciones.

| PRUEBAS DE EMISIÓN | CUMPLIMIENTO | INDICACIONES SOBRE EL ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO |
|---|-------------------------|---|
| Emisiones de RF CISPR 11 | Grupo 1 | El sistema solo utiliza radiofrecuencia de manera interna. Por lo tanto, las emisiones de radiofrecuencia son muy bajas y es poco probable que ocasionen interferencias en los equipos electrónicos cercanos. |
| Emisiones de RF CISPR 11 | Clase A | El sistema es apto para su utilización en cualquier entorno que no sea doméstico ni se encuentre directamente conectado a una red pública de fuente de alimentación de baja tensión que suministre energía a edificios destinados al uso doméstico. |
| Emisiones armónicas CEI 61000-3-2 | Clase A | |
| Fluctuaciones de tensión/emisión de centelleos CEI 61000-3-3 | Cumple con la normativa | |

Inmunidad electromagnética


Tabla 28. Guía y declaración del fabricante: Inmunidad electromagnética

El sistema está pensado para su uso en un entorno electromagnético similar al que se indica a continuación. Los clientes o los usuarios del sistema deben asegurarse de utilizarlo en tales condiciones.

| PRUEBAS DE INMUNIDAD | NIVEL DE PRUEBA CEI 60601 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | INDICACIONES SOBRE EL ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO |
|--|---|-------------------------|--|
| Descarga electrostática (ESD) CEI 61000-4-2 | ±8 kV al contacto ±15 kV por el aire | Cumple con la normativa | Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas cerámicas. Si los suelos están cubiertos por materiales sintéticos, la humedad relativa debe ser al menos del 30 %. |
| Transitorios eléctricos rápidos en ráfagas CEI 61000-4-4 | ±2 kV para líneas de suministro eléctrico Frecuencia de repetición 100 kHz | Cumple con la normativa | La calidad de la tensión de la red eléctrica debe corresponder con la de un entorno comercial u hospitalario típico. |
| Ondas de choque CEI 61000-4-5 | ±1 kV de línea a línea ±2 kV de línea a tierra | Cumple con la normativa | La calidad de la tensión de la red eléctrica debe corresponder con la de un entorno comercial u hospitalario típico. |
| Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en líneas de entrada de suministro eléctrico CEI 61000-4-11 | 0 % U_T ; 0,5 ciclos En 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, y 315° 0 % U_T ; 1 ciclo y 70 % U_T ; 25/30 ciclos Fase única: en 0° | Cumple con la normativa | La calidad de la tensión de la red eléctrica debe corresponder con la de un entorno comercial u hospitalario típico. Si el usuario del sistema precisa usarlo de forma continua durante las interrupciones del suministro eléctrico, se recomienda suministrar alimentación eléctrica al sistema mediante un sistema de alimentación ininterrumpida o una batería. |
| Campos magnéticos de frecuencia de potencia nominal CEI 61000-4-8 | 30 A/m Frecuencia: 50/60 Hz | Cumple con la normativa | Los campos magnéticos de frecuencia de alimentación deben encontrarse en niveles propios de entornos comerciales u hospitalarios típicos. |

Tabla 28. Guía y declaración del fabricante: Inmunidad electromagnética

El sistema está pensado para su uso en un entorno electromagnético similar al que se indica a continuación. Los clientes o los usuarios del sistema deben asegurarse de utilizarlo en tales condiciones.

| PRUEBAS DE INMUNIDAD | NIVEL DE PRUEBA CEI 60601 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | INDICACIONES SOBRE EL ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO |
|-------------------------------|---|-------------------------|---|
| RF conducida CEI 61000-4-6 | 3 Vrms De 150 kHz a 80 MHz 6 Vrms en bandas ISM De 150 kHz a 80 MHz 80 % AM a 1 kHz | Cumple con la normativa | Los equipos de comunicación de radiofrecuencia móviles o portátiles no deben utilizarse a una distancia de ninguno de los componentes del sistema, incluidos los cables, inferior a aquella recomendada que se calcula a partir de la ecuación correspondiente a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada: d (m) $d = 1,2 \sqrt{P}$ |
| RF radiada CEI 61000-4-3 | 3 V/m 80 MHz hasta 2.7 GHz 80 % AM a 1 kHz | Cumple con la normativa | Pueden producirse interferencias en las proximidades de los equipos con el símbolo siguiente:  |

Nota: U_T es la tensión de la red de CA anterior a la aplicación del nivel de la prueba.

Puede que estas directrices no sean aplicables en todos los casos. La propagación electromagnética puede verse condicionada por la absorción y el reflejo de las estructuras, los objetos y las personas.

Distancias de separación recomendadas

Tabla 29. Distancias de separación recomendadas entre equipos de comunicación por radiofrecuencia móviles o portátiles y el sistema

El sistema está pensado para su utilización en un entorno electromagnético en el que se controle el ruido generado por las radiofrecuencias emitidas. El cliente o el usuario del sistema pueden evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicación de radiofrecuencia móviles o portátiles (transmisores) y el sistema como se indica en las siguientes recomendaciones, de acuerdo con la salida de alimentación máxima de los equipos de comunicación.

| POTENCIA NOMINAL DE SALIDA MÁXIMA DEL TRANSMISOR (W) | DISTANCIA DE SEPARACIÓN DE ACUERDO CON LA FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN (m) | | |
|--|---|---|--|
| | De 150 kHz a 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$ | De 80 MHz a 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$ | De 800 MHz a 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |

Para aquellos transmisores cuya potencia nominal de salida máxima no se indique en esta tabla, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede calcularse mediante la ecuación correspondiente a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante.

Nota: Entre 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación del rango de frecuencia más elevado. Puede que estas directrices no sean aplicables en todos los casos. La propagación electromagnética puede verse condicionada por la absorción y el reflejo de las estructuras, los objetos y las personas.

Cumplimiento de los accesorios con las normas

Para mantener las interferencias electromagnéticas (EMI, por sus siglas en inglés) dentro de los límites certificados, el sistema debe utilizarse con los cables, los componentes y los accesorios especificados y facilitados por Verathon. Para obtener más información, consulte la sección [Componentes y accesorios](#) en página 10 y la sección [Especificaciones del producto](#) en página 85. El uso de otros accesorios o cables distintos de los especificados o suministrados puede incrementar las emisiones o reducir la inmunidad del sistema.

Tabla 30. Normas CEM para los accesorios

| ACCESORIOS | LARGO |
|-------------------------------------|-------------------|
| Cable de la sonda | 1,8 m (6,0 pies) |
| Cable de la impresora USB | 1,7 m (5,6 pies) |
| Cable de alimentación de CA | 4,5 m (15,0 pies) |
| Cable del adaptador de alimentación | 1,5 m (4,9 pies) |

Glosario

En esta tabla se proporcionan definiciones para los términos especializados que se usan en este manual o en el propio producto. Para consultar una lista completa de los símbolos de precaución, advertencia e información contenidos en este producto y otros productos Verathon, consulte el *Verathon Symbol Glossary (Glosario de símbolos de Verathon)* disponible en verathon.com/symbols.

| TÉRMINO | DEFINICIÓN |
|----------------------------|---|
| A | Amperios |
| A_{APRT} | Área de apertura activa |
| Ah | Amperio hora |
| ALARA | En el nivel más bajo posible (As low as reasonably achievable) |
| Ascitis | Acumulación de exceso de líquido en la cavidad peritoneal del abdomen |
| C | Celsius |
| Características anatómicas | Órganos o estructuras del cuerpo |
| CC | Corriente continua |
| CEI | Comisión Electrotécnica Internacional |
| CEM | Compatibilidad electromagnética |
| cm | Centímetros |
| EDS | Dimensiones de entrada de la exploración |
| EMI | Interferencias electromagnéticas |
| ESD | Descarga electrostática |
| F | Fahrenheit |
| f_{awf} | Frecuencia de trabajo acústica (definición 3.4, CEI 62359: 2010) |
| f_c | Frecuencia del centro |
| FDA | Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. |
| g | Gramos |
| GHz | Gigahercios |
| HCD | Historia clínica digital |
| HCE | Historia clínica electrónica |
| hPa | Hectopascales |
| Hz | Hercios |
| I_{sppa} | Intensidad máxima espacial, media del impulso |
| I_{spta} | Intensidad máxima espacial, media temporal |
| ITU | Infección urinaria |
| kHz | Kilohercios |
| m | Metros |
| MHz | Megahercios |
| MI | Índice mecánico |

| TÉRMINO | DEFINICIÓN |
|----------------|---|
| <i>ml</i> | Mililitros |
| mm | Milímetros |
| Modo B | Modo de visualización que muestra el enfoque de una exploración actual o guardada como una imagen ecográfica. |
| Modo C | Modo de visualización que muestra el enfoque de una exploración actual o guardada como cruceas en un área de color. |
| MPa | Megapascales |
| mW | Milivatios |
| OCP | Protección de sobrecorriente |
| OVP | Protección automática de sobretensión |
| Paciente fetal | Un feto en el útero de una paciente embarazada |
| PD | Duración del pulso |
| P_o | Energía ultrasónica |
| $P_{r.3}$ | Presión de pico de rarefacción rebajada |
| PRF | Frecuencia de repetición de pulso |
| <i>pulg.</i> | Pulgadas |
| RAEE | Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos |
| RF | Radiofrecuencia |
| SCP | Protección de cortocircuito |
| TI | Índice térmico (definición 3.56, IEC 62359: 2010) |
| TIB | Índice térmico de hueso (definición 3.17, IEC 62359: 2010) |
| TIC | Índice térmico de hueso craneoencefálico (definición 3.21, IEC 62359: 2010) |
| TIS | Índice térmico de tejidos blandos (definición 3.52, IEC 62359: 2010) |
| Uso básico | Uso del sistema necesario para evitar riesgos inaceptables |
| V | Voltios |
| W | Vatios |
| Wh | Vatios hora |
| Z_{sp} | Distancia axial a la cual se mide el parámetro reportado |
| μs | Microsegundos |

verathon